

＜特長＞

- 発熱時などに頭部に巻いて使用します。
- 冷凍室で冷やしても固まらないジェルですので、頭部にフィットします。

＜使用上の注意＞

- 本製品は食べられません。絶対に口に入れたりしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は多量の水を飲ませて吐き出させてください。また、目に入った場合は流水で15分以上洗い流してください。応急処置後は直ちに専門医に相談の上、診断や手当てを受けてください。
- 破れて中身が皮膚や衣服に付いた場合は流水で十分に洗い流してください。
- 頭部に当てる時には専用カバーかタオル等で包んでご使用ください。特に乳幼児、肌の弱い方、身体の不自由な方へのご使用時には十分ご注意ください。
- 長時間のご使用は凍傷になる恐れがありますのでご注意ください。
- 疾病で使用する際は、医師にご相談ください。
- 知覚機能低下や意思表示が難しい方に使用する場合は、事故防止のため、周囲の方が常に観察の上ご使用ください。
- 電子レンジの自動モード（オート加熱・おまかせ加熱）や「クイック」「あたため」などの機能は使用しないでください。
- 袋に破れなどの異常が見られた場合は使用しないでください。
- 本製品に強い荷重をかけたり衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光を避け、お子様の手の届かない涼しい所に保管してください。

＜使用方法＞

- 冷凍庫内に水平に置いてください。
- 下表を参考に冷却を行ってください。
- ご使用の際は必ず専用カバーかタオル等で包んでください。冷え過ぎる場合はタオル等でお好みの温度に調節してください。

品番	7-3606-01
型番	HAP
サイズ(mm)	75(幅)×700(長さ)×10(厚み)
重量(g)	140
材質	本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、綿 内容物/水・グリセリン・吸水性ポリマー・防腐剤 カバー/ポリエステル
付属品	専用カバー(手洗い可)
使用可能範囲	約50～63cm(頭部周り)
目安時間	冷凍庫に約12時間
持続時間	15℃以下を20分以上保冷

【商品に関するお問い合わせは】

カスタマー相談センター
TEL 0120-711-875
<https://help.as-1.co.jp/q>

輸入発売元

アズワン株式会社

MADE IN CHINA

＜特長＞

- 発熱時などに頭部に巻いて使用します。
- 冷凍室で冷やしても固まらないジェルですので、頭部にフィットします。

＜使用上の注意＞

- 本製品は食べられません。絶対に口に入れたりしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は多量の水を飲ませて吐き出させてください。また、目に入った場合は流水で15分以上洗い流してください。応急処置後は直ちに専門医に相談の上、診断や手当てを受けてください。
- 破れて中身が皮膚や衣服に付いた場合は流水で十分に洗い流してください。
- 頭部に当てる時には専用カバーかタオル等で包んでご使用ください。特に乳幼児、肌の弱い方、身体の不自由な方へのご使用時には十分ご注意ください。
- 長時間のご使用は凍傷になる恐れがありますのでご注意ください。
- 疾病で使用する際は、医師にご相談ください。
- 知覚機能低下や意思表示が難しい方に使用する場合は、事故防止のため、周囲の方が常に観察の上ご使用ください。
- 電子レンジの自動モード（オート加熱・おまかせ加熱）や「クイック」「あたため」などの機能は使用しないでください。
- 袋に破れなどの異常が見られた場合は使用しないでください。
- 本製品に強い荷重をかけたり衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光を避け、お子様の手の届かない涼しい所に保管してください。

＜使用方法＞

- 冷凍庫内に水平に置いてください。
- 下表を参考に冷却を行ってください。
- ご使用の際は必ず専用カバーかタオル等で包んでください。冷え過ぎる場合はタオル等でお好みの温度に調節してください。

品番	7-3606-01
型番	HAP
サイズ(mm)	75(幅)×700(長さ)×10(厚み)
重量(g)	140
材質	本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、綿 内容物/水・グリセリン・吸水性ポリマー・防腐剤 カバー/ポリエステル
付属品	専用カバー(手洗い可)
使用可能範囲	約50～63cm(頭部周り)
目安時間	冷凍庫に約12時間
持続時間	15℃以下を20分以上保冷

【商品に関するお問い合わせは】

カスタマー相談センター
TEL 0120-711-875
<https://help.as-1.co.jp/q>

輸入発売元

アズワン株式会社

MADE IN CHINA