

取扱説明書

LED 検耳鏡

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使いください。

使用上の注意

- ・本取扱説明書に記載されている用途以外に使用しないでください。
- ・使用中あるいは使用直後は、電球部分及び周辺部が高温になる場合がありますので、皮膚などに触れないように注意してください。
- ・LED 電球を交換する際は、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換してください。
- ・本品の光源を見つめたり、連続して眼球を照明したりしないでください。
- ・瞳孔径や嫌悪反応が通常ではない場合は、目を保護してください。
- ・可燃性の麻酔ガスなどの環境下では絶対に使用しないでください。
- ・改造および分解はしないでください。
- ・振動や強い衝撃を与えないでください。
- ・水濡れに注意し、高温多湿及び直射日光を避け保管して下さい。

製品各部の名称と仕様



項目	仕様
電球種類	3200K LED 電球
全長	約 162mm (突起部含まず)
本体重量	約 140g (電池含まず)
定格電圧	DC 3V
使用条件	温度：10～35℃ 湿度：30～75%
付属品	リューザブルスペキュラ (2.4/3/4/5 mm) 各 2 個 単 3 乾電池 (テスト用) 2 個 取扱説明書 添付文書

使用方法等

【使用方法】

- (1) 患者の外耳道に適したサイズのスペキュラをヘッド先端に装着し、時計回りに回転させて固定します。(図 1)
- (2) 本体の電源スイッチを操作し、電源を入れます。(図 2)
- (3) 本体ヘッド部から光が出ます。
- (4) 患者の外耳道にスペキュラ先端部を挿入します。(図 3)

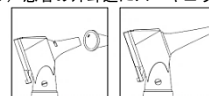


図 1



図 2



図 3

【LED 電球の交換方法】

- (1) 電源をオフにし、ヘッド部を回してハンドル部から取り外します。
- (2) 使用済 LED 電球を取り外して新しい LED 電球 (別売：7-4861-12) に交換し、ヘッド部をハンドル部に装着してください。(右図参照)



【乾電池の交換方法】

- (1) 底部を回してハンドル部から取り外します。
- (2) 使用済乾電池を取り外し、新しい乾電池のプラス極がヘッド部を向くように挿入してから、底部をハンドル部に装着してください。(右図参照)



※使用済の LED 電球および乾電池は、各自治体の指導に従って廃棄してください。

取扱上の注意

- ・長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り外して保管してください。
- ・クリーニングの際は 75% アルコールで湿らせた布で、本体表面を拭いてください。(拡大鏡は拭かないでください。) また腐食性、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。
- ・本体をアルコールや水に浸漬したり、高圧蒸気滅菌しないでください。
- ・スペキュラは高圧蒸気滅菌が可能です。滅菌条件は、134℃、3 分を推奨します。

マークについて

種類	意味
 TYPE B	B 形装着部

製品一覧表

品名	商品コード	仕様
LED検耳鏡	7-4861-01	本体 NV-OT10
	7-4861-11	交換用リニューザブルスペキュラ (2.4/3/4/5mm)
	7-4861-12	交換用LED電球

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づき正常な使用状態での故障の際は下記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL.		

アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://helpas-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@soas-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2017年8月初版作成