

取扱説明書

Instruction Manual

歩行訓練マット

7-3450-01 IKD-RM

お買い上げ誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管して下さい。

使用上のご注意

●取扱注意事項


- ・使用方法が不適切な場合等において、生命、身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師、専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れ等皮膚に異常を感じた際は、直ぐ使用を中止して下さい。

●特長

- ・本製品は見た目は同じ色をしていますが、3種類の硬さの違うウレタンを使用して作られた歩行訓練マットです。
- ・マットの上で足踏みやステップ運動を行う事で、バランス能力を高めたり、姿勢を保つ事に関連する筋肉を上手に調節する能力を高めることが期待できます。

●洗濯方法/洗濯時の注意

- ・カバーのみ手洗いができます。(水温30℃まで)
- ・緩衝材は洗えません。
- ・塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。
蛍光増白剤を含む洗剤を使用されますと、色ムラや変色の恐れがございますのでご注意下さい。
- ・縮み、変形、破損の原因となりますので、高温乾燥機のご使用はお避け下さい。

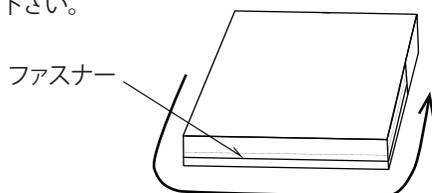

※カバーは取り外す事ができます。矢印の方向にファスナーを開け、緩衝材を取り出してからカバーを洗濯して下さい。

●材質


表地：ポリエステル 100% (防水加工)
緩衝材：低反発ウレタン、軟質ウレタン、硬質ウレタン
シーネ：塩化ビニール

●入り数：3種(低反発・高反発・高反発+異物)×各1枚

●寸法

縦：45 cm × 横：45 cm × 厚さ：6 cm


商品仕様

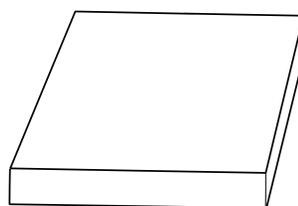

低反発

60mm厚：
低反発ウレタン

[断面図]

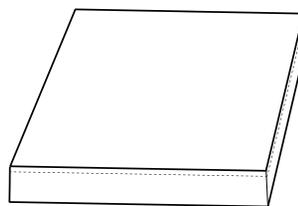


高反発

5mm厚：
硬質ウレタン

55mm厚：
軟質ウレタン

[断面図]

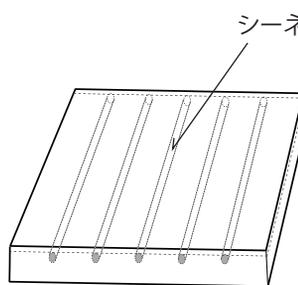

高反発+異物

10mm厚：
硬質ウレタン

50mm厚：
軟質ウレタン

[断面図]

75mm間隔

AS ONE アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL: 0120-711-875 FAX: 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません