

商品適用説明

- 手首の保護が必要な方
- 手首の弱い方
- 手首の不安定な方
- 手首に痛みのある方

取り扱い方法

- 洗濯の際は手洗いで洗濯機は使用しないでください。
- 水で中性洗剤で押し洗いをし、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 日の当たらない場所でつり干して乾かしてください。乾燥機の使用は避けてください。

使用上の注意事項

- アレルギー体質の方、装着部に傷、腫れ、湿疹などの異常のある場合、使用しないでください。
- 本品の使用は必ず本使用説明書に記載されている装着手順に従ってください。
- 本品使用中に痛みや痺れ、かぶれ、フィッティングの不具合等の支障が生じた際には速やかに使用を中止し専門医に相談をしてください。
- 本品は使用期間や状況によって縫製部分等が磨耗、破損する場合があります。その際には速やかに使用を中止してください。
- 使用中にズレやゆるみが生じた際には正しく装着しなおしてください。ケガをするおそれがあります。

販売元: **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120 -711-875

FAX 0120 -700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

Dr. MED
The most reliable Brand

EC REP CEpartner4U

Esdoomlaan 13 3951 DB

Maam The Netherlands

www.cepartner4u.eu



A-MI GLOBAL CO., LTD.

22, Jangnimbeonyeong-ro 104 beon-gil, Saha-gu,

Busan, Korea

Tel. +82-51-293-6472/3 Fax. +82-51-293-6474


E-mail. ami293@korea.com www.drmedbrace.com

MADE IN KOREA

ver. 2017. 09. (2017年9月初版作成)

All details and the copyright are reserved by A-MI GLOBAL CO., LTD.
Unauthorized copying and redistribution without the written permission, you may receive sanctions under applicable law.

Dr. MED
The most reliable Brand

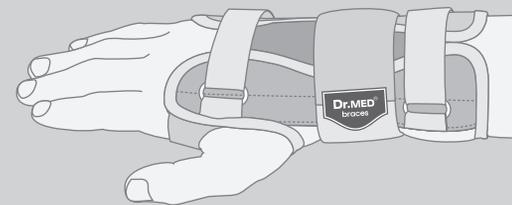


使用説明書

手首サポーター



着用方法 ※注意：サポーター本体およびストラップをきつく締めすぎると血行を妨げるおそれがあります。ご注意ください。

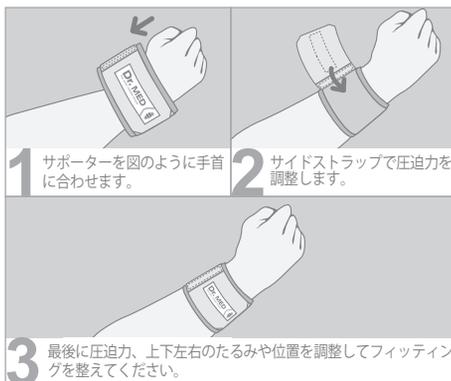


TYPE 1 リストサポーター

商品型番: DR-W001/W002/W008/W011/W136 etc.



TYPE 2 リストプリント

商品型番: DR-W003/W004/W007/W010/W012/W020/W021/W055 etc.

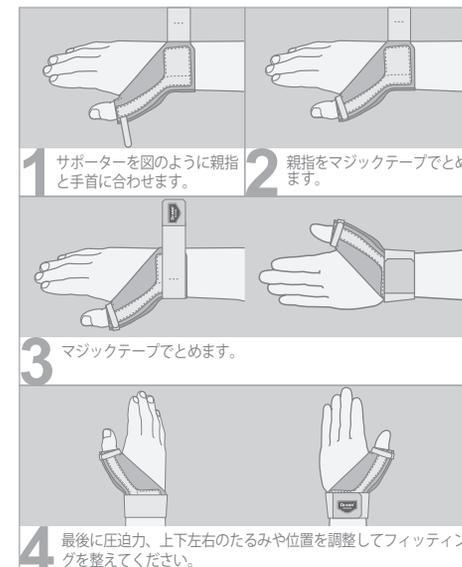

TYPE 3 リストサムサポーター

商品型番: DR-W022/W132/W132-1/W132-3 etc.