

取扱説明書

0-2395-01 ステッカー

- 1、使用用途 杖等を使用しないと歩行するのが困難な方の補助として使用していただけます。
- 2、特徴 小型のため室内の歩行の補助に便利です。また、ハンドルの高さが調整式になっているため、身長によって使い分けが可能です。さらに、病院や施設などの複数所有しているようなところでも、重ねて収納できます。
- 3、取扱上の注意
 - ①段差のあるところでは転倒する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
 - ②高さ調整した後は必ずノブネジでしっかりと締めてください。また使用するたびにノブネジが、緩んでいないかご確認ください。
 - ③急な加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますので注意してください。
 - ④傾斜のある床面での使用はおひかえください。
 - ⑤適切な姿勢で使用してください。(身体が極端に前や後ろに傾かないようにまたハンドルに均等に加重してください。