

取扱説明書

Instruction Manual

移動式シャワー椅子

7-4437-01 HB7065L

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図及び各部名称

背もたれ



梱包品の確認

まず初めに製品および付属品をご確認下さい。

〈付属内容〉

脚×4、メインフレーム×1、背もたれ×1、接続パイプ×2

梱包品に不足品および製品に異常(変形・破損・動作しない等)がないことをご確認下さい。


もし、不足品・不良品がございましたら、ただちにお買い求めの販売店までご連絡下さい。

<p>脚 (4本)</p>	<p>メインフレーム (1個)</p>
	
<p>背もたれ (1個)</p>	<p>接続パイプ (2個)</p>
	

組立方法

- 1** 接続パイプをメインフレームの両側に差し込みます。
このとき接続パイプのプッシュボタンが、メインフレームにある穴にしっかりとハマるように、カチッと音がするまで差し込んで下さい。

※プッシュボタンが差し込みづらい場合は、座部を裏返し、横から接続パイプを差し込むとスムーズに入ります。

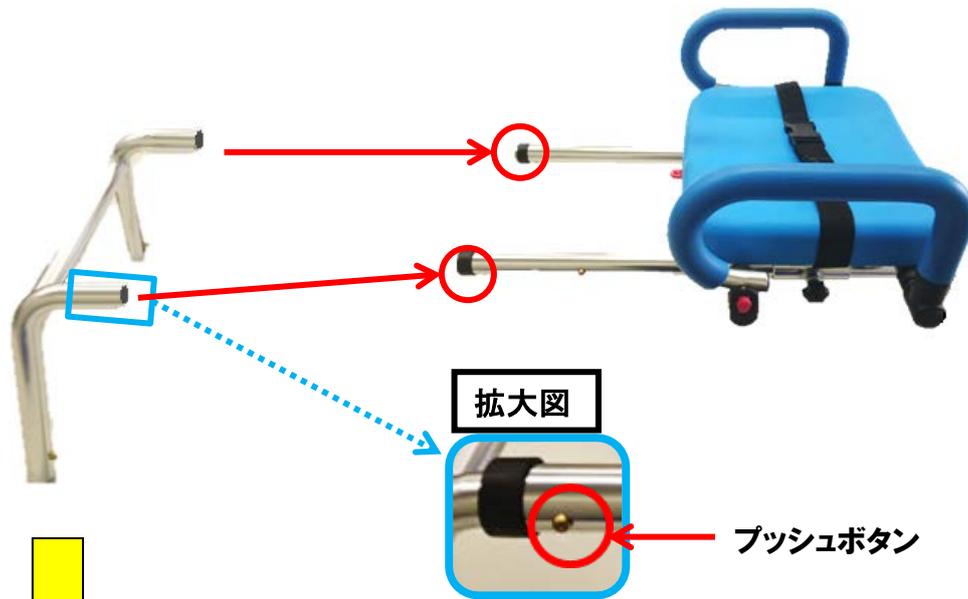


カチッと音がするまで差し込んで下さい。



メインフレームを裏返して作業をすると、パイプが差し込みやすくなります。

- ②** 脚を接続パイプに差し込みます。
このとき接続パイプのプッシュボタンが、脚にある穴にしっかりはまるように、カチッと音がするまで差し込んで下さい。

※脚の先端のゴム底が、地面にしっかり着くように向きを合わせてください。
向きが合っていない場合、椅子がぐらつく恐れがあります。

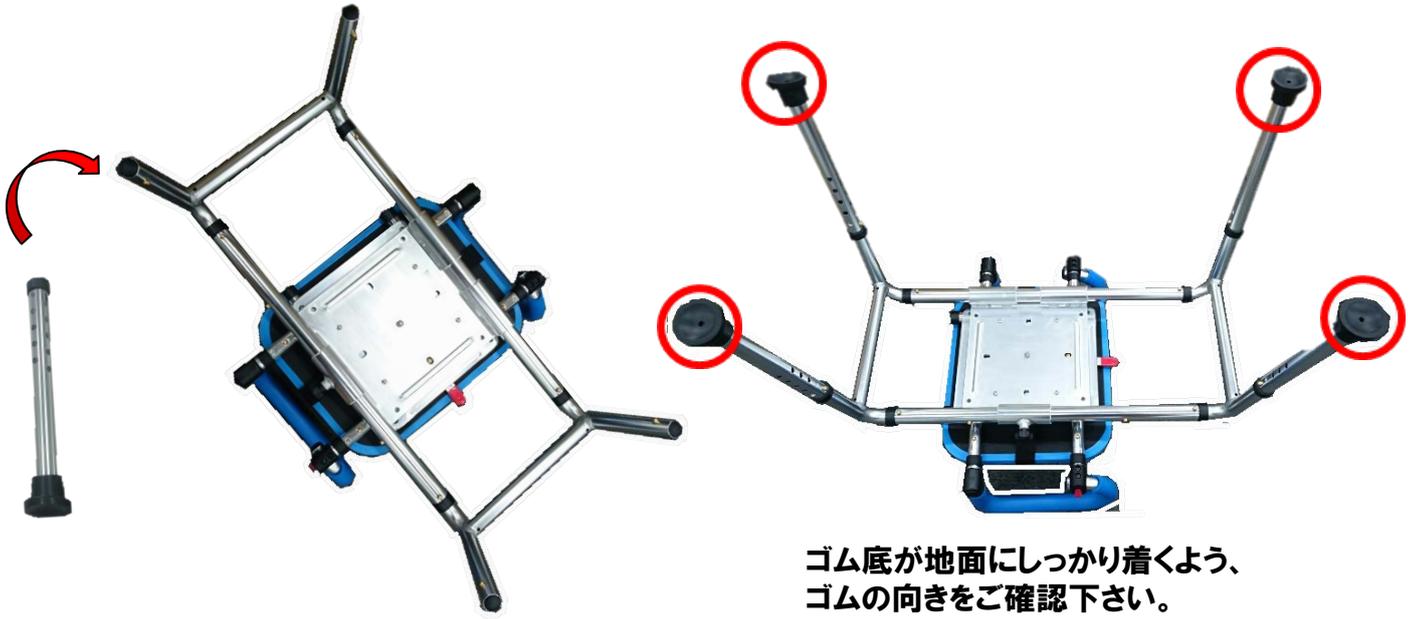

- ③** 背もたれのパイプをメイフレームの座部のパイプに差し込みます。
このとき背もたれのパイプのプッシュボタンが、座部のパイプにある穴にしっかりはまるようにカチッと音がするまで差し込んで下さい。



使用方法

◆回転させる

座部の下部、中央にある赤いレバーを押しながら、座部を持ち、ゆっくりと回転させます。




◆移動させる

メインフレームの、座部の下部にある黒のハンドルを押し込みながら、座部を持ち、ゆっくりとスライドさせます。



◆肘掛を動かす

肘掛の側面にある赤いボタンを押して、肘掛の前部をメインフレームから外し、動かします。肘掛を固定する際は、プッシュボタンがカチッと音がするまでしっかりとめ込んで下さい。

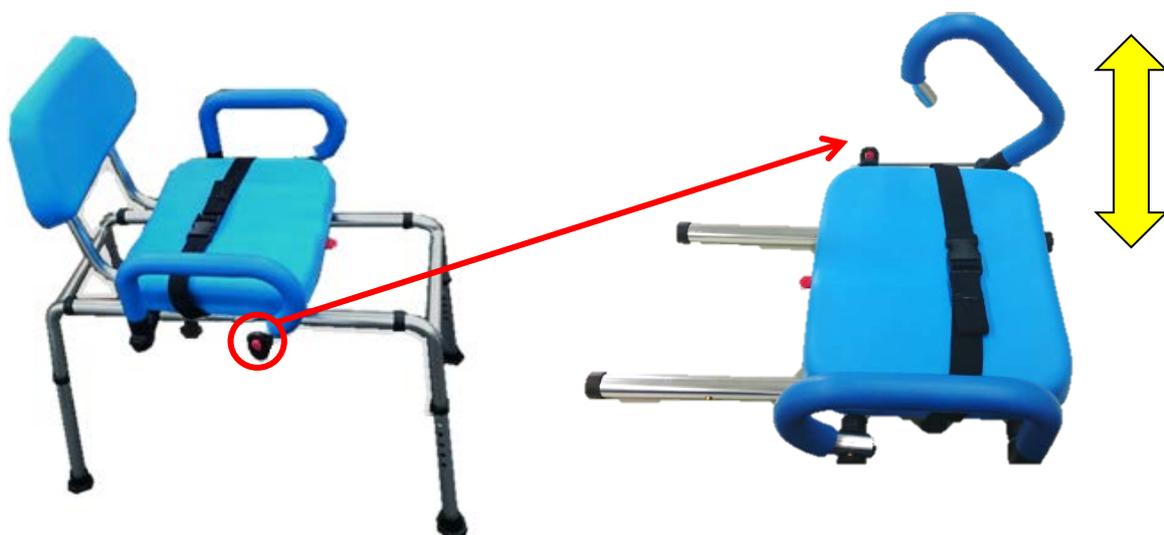

ご注意

- 必ず平坦な安定した場所で使用して下さい。
- 先端ゴム交換の際は、正しいサイズのものに、4個同時に交換してください。
個別に交換した場合、ぐらつきや転倒の原因になる恐れがあります。
(交換用先端ゴム:0-6629-11)

設置方法

1. 2脚は浴槽の中に、残り2脚は洗い場に置きます。
その際、水平かつ安定な状態であることを常に確認して下さい。
2. 両足が25mm間隔で高さ調節ができますので、適当な高さにして下さい。
3. グラツキがなく、安定した動きを確認した上で、ご使用下さい。
4. 平らな洗い場に置き、4脚を同じ高さに調節しますとシャワー椅子になります。

お手入れ方法とご注意

- ご使用後には都度、本体やパイプに付いた石けんやシャンプーを洗い流して下さい。
- 洗浄する際には中性洗剤をご使用下さい。
- 塩素系の薬剤や、温泉水、硫黄系の入浴剤は使用しないで下さい。
- クレンザーなどの磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどを使用しないで下さい。
塩素系漂白剤、酸やアルカリ性洗剤、シンナー、クレゾールなどは使用しないで下さい。
製品の劣化による破損・腐食や、変色など引き起こす恐れがあります。
- タワシや歯磨き粉等は使用しないでください。劣化の原因になります。
- 天日干しはしないでください。紫外線の影響で劣化の原因になります。
- お手入れの際、各部に緩みやガタツキ、パイプが曲がっていないか、先端ゴムが摩耗・破損していないかご確認下さい。

保管のしかた

- 長くお使い頂くために、直射日光に当たるような場所での保管はお避け下さい。
- ご使用後にはお手入れ方法に基づいてお手入れして下さい。
また、使用後・洗浄後の水分を十分切って乾かした上で、ご使用下さい。
- お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- 中性洗剤を薄めたものをスポンジや柔らかい布にふくませ、汚れをふき取った後、水で洗剤を洗い流して下さい。
- 汚物などで汚れた場合には、すみやかに洗浄して下さい。座面や背もたれにシミとなって残る恐れがあります。
- 汚れをふき取った後、屋外に放置したり、直射日光に当てないで下さい。色褪せ、ひび割れの原因になります。
- 塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
EVA樹脂、プラスチック、アルミパイプが劣化、変色する恐れがあります。
- 濡れたままの状態ですと、カビが生じる場合があります。使用後は柔らかい布などで水気をふき取り、湿気の少ない風通しのよい場所で保管して下さい。

ご使用上の注意



- 入浴者には必ず介護者が付き添って下さい。入浴者の単独使用はお止め下さい。
- プッシュボタンがパイプの穴から完全に出た状態でロックされ、半掛かりになっていないことを確認してください。ロックが不完全な状態で使用すると、転倒してケガの原因になります。
- 移動の際は、ゆっくりと動かすように心がけて下さい。
- 安全のため、ご使用の前に各部のネジの緩みがないか、プッシュボタンが正しく固定されているか、各部に異常がないかを都度点検の上、ご使用下さい。
- 定期的に（少なくとも1か月に1度）各部に破損やガタツキがないかを全体点検して下さい。
- 回転部分を必要以上にゆすることは、本製品のバランスを崩すことになり、転倒する危険がありますのでお止め下さい。
- 座部を回転するときは、安全を確認しながらゆっくりと動かして下さい。
- 先端ゴムを取り付けない状態で使用しないで下さい。取り付けないままご使用頂いた場合、製品がガタついたり浴室内で滑ったり、転倒する危険があります。
- 先端ゴム交換の際は、正しいサイズのものに、4個同時に交換して下さい。個別に交換した場合、ぐらつきや転倒の原因になる恐れがあります。
- ご使用中に変形や曲り、ネジの緩みなどによるガタツキや異音がした場合、破損を見つけたり、いつもと違う違和感を感じた場合、すぐにご使用を停止して下さい。
- 本体やパイプが破損し、ケガする恐れがあるため、体重が100kg以上の方は本製品をご使用頂けません。
- 誤った使用方法や無理な荷重は、変形・損傷の原因になりますので、お止め下さい。
- 改造や代用部品の使用はしないで下さい。本品の破損や使用中の事故につながる恐れがあります。

仕様

項目	内容
品番	7-4437-01
商品名	移動式シャワー椅子
型番	HB7065L
外寸	730×520×749～849mm (幅×奥行×高さ)
座面サイズ	330×390mm ※設置可能浴槽深さ510mm
座面高さ	510～610mm (25mm間隔 5段階)
重量	10kg
耐荷重	100kg
材質	本体 : アルミニウム 高さ調節プッシュボタン : 真鍮 座面・背もたれ : PU 高さ調節ハネ : ステンレス 肘掛 : EVA

Made in Taiwan

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>お買い上げ日より1年間</td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>お名前</td> <td>様</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>TEL.</td> </tr> <tr> <td>取り扱い店名</td> <td>担当者印</td> </tr> <tr> <td>住所</td> <td>TEL.</td> </tr> </table>	品名		品番		保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名																	
品番																	
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません