


脳室ドレナージスタンド 0-2684-01

この度は、ご購入頂き誠に有難うございます。安全にお使い頂くために、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、説明書は大切に保管のうえ必要に応じお読みください。

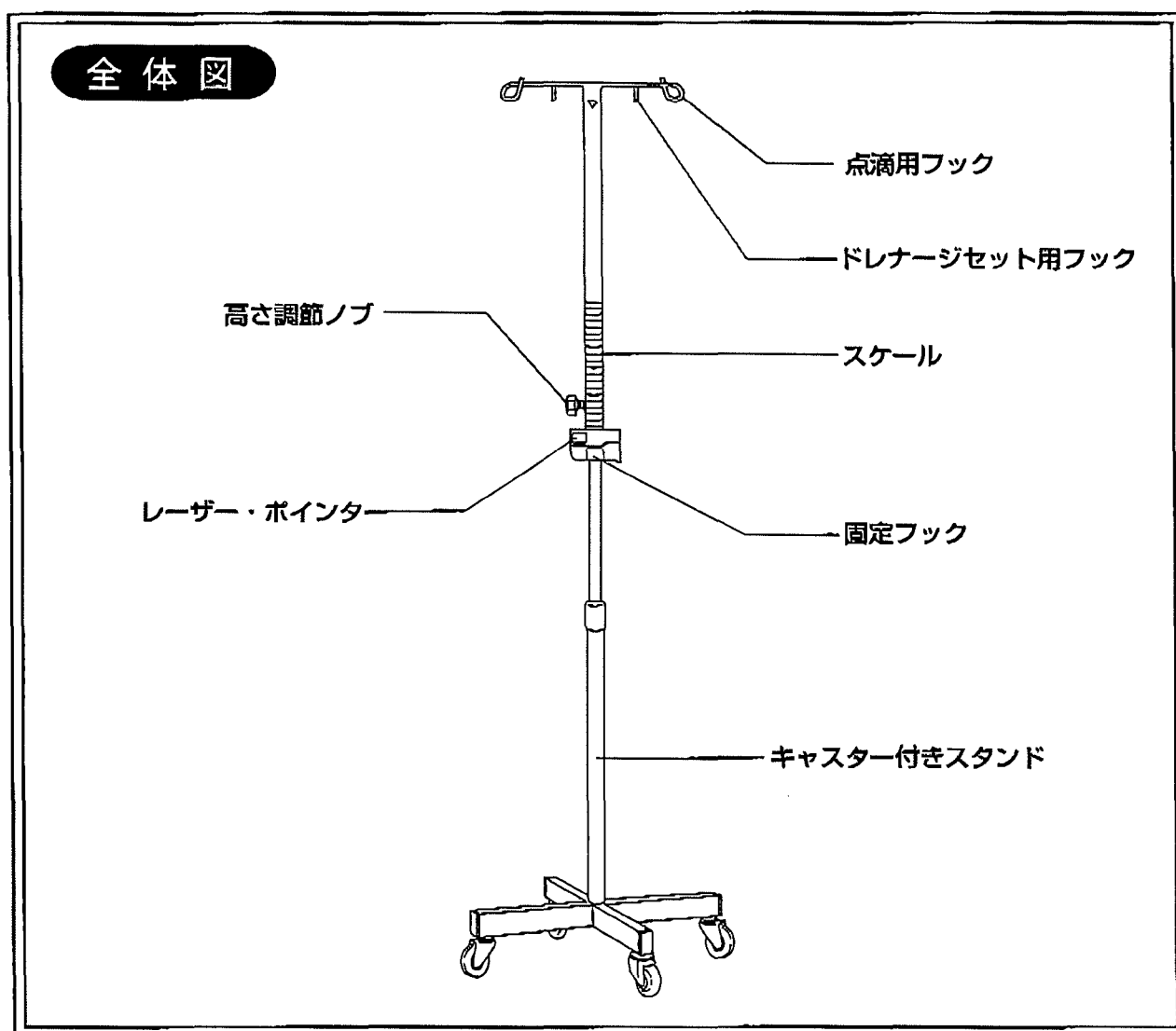

アズワン (株)


取付と使用方法

※同梱のレーザーポインターの取扱方法

レーザーポインターの使い方は別添の取扱説明書をよくお読みください。

※ドレナージセット（他社別売品）の取付と使用方法

1. 本体スタンドは、①ドレナージセット用フックポール ②高さ調節用内筒ポール ③キャスター付きスタンドからなっています。
2. ①ドレナージセット用フックポールにはドレナージセットが掛けられるフックが付いており、通常の点滴スタンドとしても使用できるように両サイドにもフックを設けています。また、④レーザーポインターを取り付ける受け金具とレーザー発光の中心線「0ポイント」から5mm間隔で200mmまでラインを刻み、圧ゲージのスケール目盛りを施しています。
3. ④レーザーポインターはグリップを折りたたんだ状態で受け金具に差し込み、レーザー光がスケールの一番下のライン「0」と同じ高さで支柱に対して直角であるかを確認してセットしてください。
4. ②高さ調節用内筒ポールは①ドレナージセット用フックポールと③キャスター付きスタンドの中に連結させるかたちで固定させ、患者の耳孔付近にレーザー光を当てる時の高さ調節として使用します。
また、③キャスター付きスタンドを外してベッド枠の棚穴につけることもできます。但し、ベッドによってつけられない場合もあります。
5. セット後は各グリップがきっちりと締まっていることを確認してください。

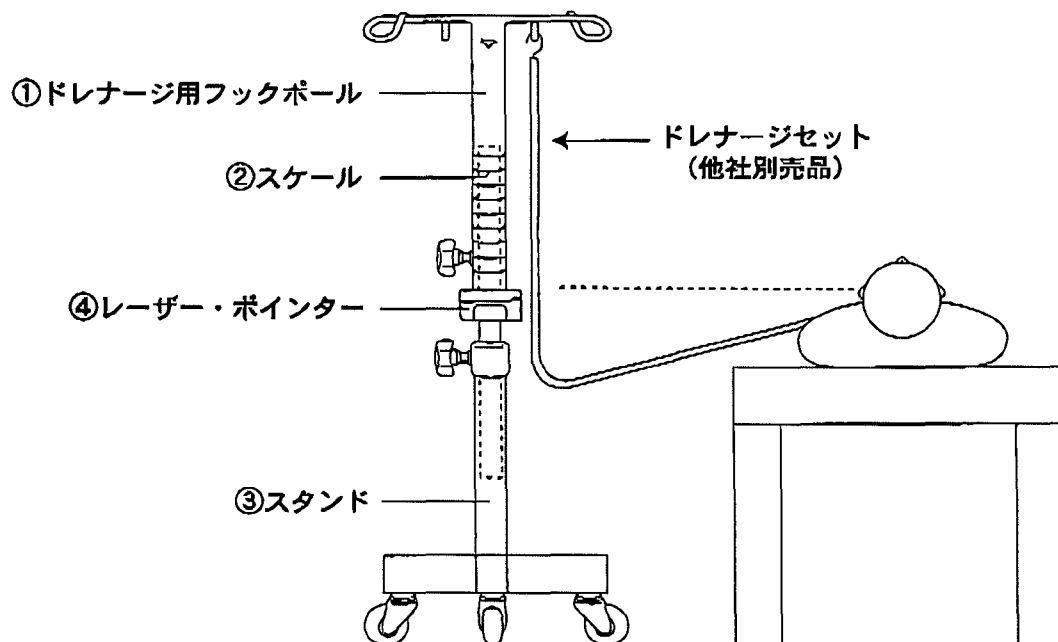

⚠ 使用上の注意と警告

- ノブはゆるみなく、しっかりと締めてください。
- レーザー・ポインターに電池を入れる場合、極性にご注意ください。本体側面に記入されています。
- レーザー・ポインターの動作時には絶対にのぞき込まないでください。
- レーザー光線を直接患者さんの目に当てることは、絶対にしないでください。目に傷害を与え大変危険です。
- レーザー・ポインターを本器以外の目的で使用することは絶対にしないでください。
- 長時間使用しない場合は、レーザー・ポインターの電池を取り外し保管してください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。

仕 様

〈スタンド〉

外 径 寸 法	(幅) 450×(奥行) 450×(高さ) 1280~2100mm
キ ャ ス タ ー	φ50mm
材 質 / 本 体	ステンレス製

〈レーザー・ポインター (KS-201)〉

外 径 寸 法	(幅) × (奥行) × (高さ) mm
レ ー ザ ー 波 長	670nm
レ ー ザ ー	可視光半導体レーザー (赤色)
レーザー光線測定範囲	650~1500mm
レーザー光線スポット直径	3m先で約7mm
レ ー ザ ー 電 池 寿 命	単4アルカリ2個、連続8時間

■商品についてのお問い合わせは…

カスタマー相談センター
TEL 0120-0120-711-875
FAX 0120-0120-711-763

お買上げ年月日	平成 年 月 日
購 入 先 店 名	
住 所	
お 電 話 番 号	

販売店さまへ 上に必ずご記入のうえお渡し下さい。