

☆ 取扱説明書 ☆

品名 カルテスタンド 卓上型

《 R-700N 0-3446-11 》

I. 本製品の使用用途と特徴及び取扱上の注意

1. 使用用途 卓上用のカルテブックの収納ラックとして使用します。
2. 特徴 ナーステーブル上などに設置することで、カルテブックの整理整頓にも役立ちます。また、本ラックは円形回転式ですので四方からカルテブックの選択取出しがスムーズに行えるなどの利点の多い商品です。
3. 取扱上の注意
 - ① カルテブック60冊分が収納できるように設計しておりますので、異常に重量があるものは載せないように注意してください。
参考資料：カルテブックサイズ 《A4タイプ 315(縦)x250(横)x30(背幅)mm》
 - ② 本ラックは水平な面に設置してください。多少でも、傾きがある場合はラックの回転に異常を起こす場合がありますので、その様な場所での設置は避けてください。
 - ③ ステンレス板の切断面に直接、手を触れないで下さい。

II. 材質及び規格

1. 材質 ステンレスSUS304
2. 寸法 $\Phi 740 \times$ (高さ)400mm
3. 収納数 カルテブック(A4、B5 共)収納数60冊

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません