


取扱説明書

この度は、**身長計ナイススケール** をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読み下さい。

外觀図とセット方法

■外觀図

距離を測定する
光線の発射口

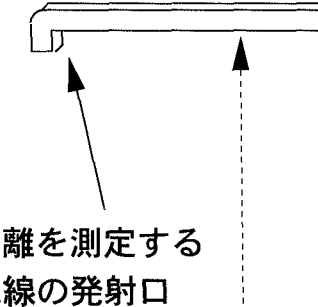


水準器



線のあいだに空気泡が来るようにします。

距離表示窓

CM表示とインチ表示が選択できます。
ONスイッチを約10秒間押すと表示が点滅
します。点滅中にONスイッチを押すと
CMとインチが切り替わります。CMを選び
再びONスイッチを約10秒間押すとセット
完了します。

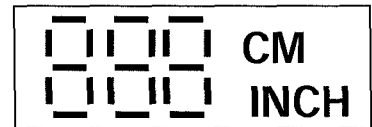

ONスイッチ

ONスイッチを押すと距離表示窓に身長が
表示されます。ONスイッチを放すと約30
秒後に表示が消えます。


■セット方法

計測よこ棒を保持たて
棒に差し込みます。

※注意：
正確な測定のためには計測よこ棒
が正しく水平になるようにご注意
ください。

裏フタ
上にずらす
と外れます

裏フタを外して
9V箱型乾電池を
差し込みます。

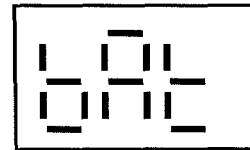

と表示されたら電池の
残量がありませんので
交換してください。


主な仕様

- 測定範囲： 50～300 cm
- 使用温度： 15～30 °C
- 電源： 9V箱型乾電池
- サイズ： 50X34X4 cm

※より正確な測定のためには別売の壁掛けホルダーやスタンドをご利用ください。

オプション 設定の方法


壁掛けホルダー使用例

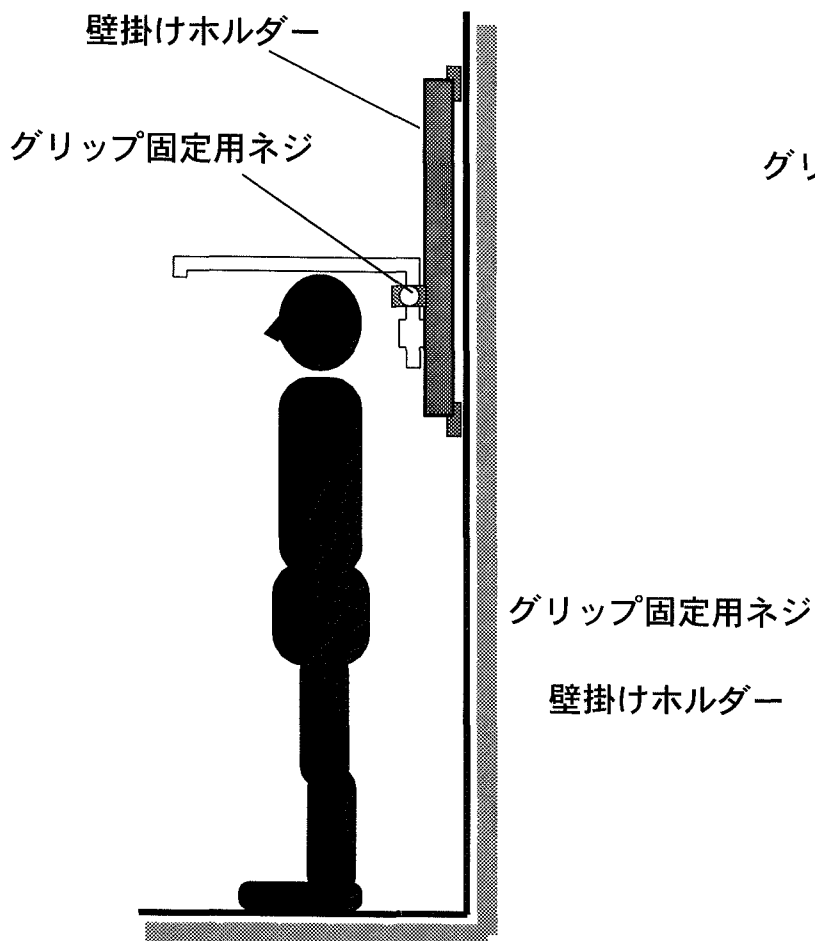

設定の方法

- ① ●壁掛けホルダーを、かべ面に合わせて設置します。
●スタンドを床に設置します。
- ② ●ナイススケール身長計を壁掛けホルダーにセットします。
●ナイススケール身長計をスタンドにセットします。
- ③ ナイススケール身長計をグリップ固定用ネジで固定します。
- ④ ナイススケール身長計を押し上げて、計測準備態勢にします。

スタンド使用例

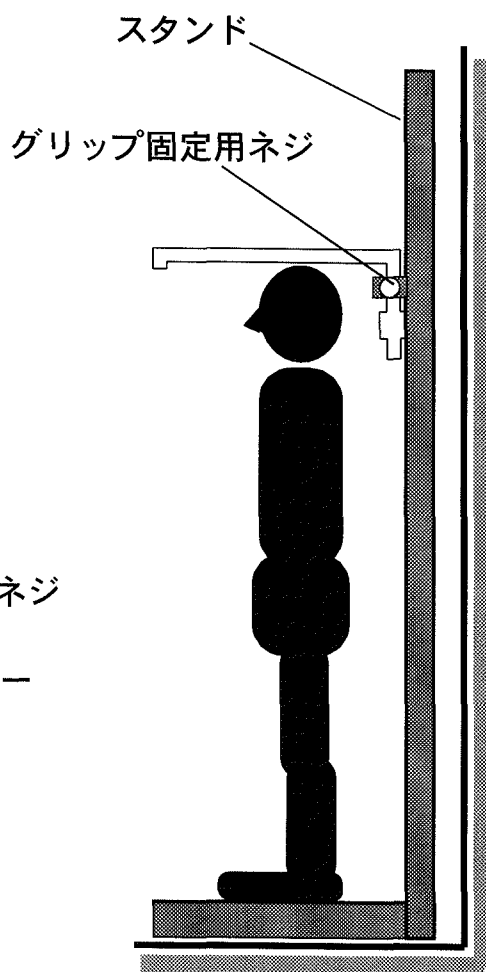

使用方法

- A. ナイススケール身長計の下に立ちます。
- B. ナイススケール身長計を押し下げて、正確に頭の上に押し当てます。
- C. 表示窓に出てきた数値を読み取ります。