

## 取扱説明書

品名	静かな回診車	QH-600(0-3311-01)
		QH-750(0-3311-02)
		QN-600(0-3310-01)
		QN-750(0-3310-02)

- 1、使用用途 院内の回診用ワゴンとして、診察用小物類を載せての、運搬に使用します。
- 2、特徴 ステンレス製ですので、耐薬品性、耐錆性、耐久性に優れ美しく試用できます。また防震性、防音性を保つため天板、棚板の裏にゴム板を張っております。QHシリーズには引出しがついてます。
- 3、使用上の注意
  - ① 床面が凹凸状態のところでの押し歩きは、キャスター等の故障のもととなりますので、その様なところでは使用しないでください。
  - ② 棚板には、耐過重以上の重量にならないように注意してください。
  - ③ ステンレス板の切断面に直接、手を触れないでください。

株式会社 井内盛栄堂