

取扱説明書

Instruction Manual

おうとくりん

お買い上げ誠にありがとうございます。

凝固剤入り

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

[セット内容]

身に着けるもの



× 4枚

手袋



× 1足

シューカバー



× 1枚

マスク



× 1枚

長袖エプロン

処理道具



× 10枚

ペーパータオル



× 2枚

ゴミ袋



× 1枚

吐しゃ物凝固剤 100g
(商品J-ド : 8-9972-01)




× 2枚

ディスポちりとり
(商品J-ド : 7-1338-01)

[用途] 汚物などの処理

[ディスポちりとり]の組立方法

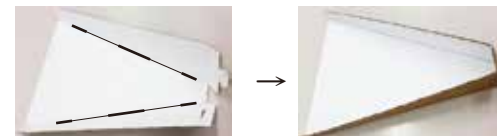

点線部分を折りあげます

[注意事項]

- 本商品は、使い捨てタイプですので、使用後は破棄して下さい。
- ご使用時、必ず手袋・マスク・エプロン・シューカバーを着用して下さい。
- 汚物処理時は、感染に十分注意して行って下さい。
- 吐しゃ物凝固剤（粉末状）を吸い込まないように注意してお取り扱い下さい。
- 吐しゃ物凝固剤を飲み込んだ場合は、水で口の中を洗浄し、可能であれば多量の水を飲んでから吐きだし、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 目に入った場合は、水で洗い流して下さい。異常があれば医師の診察を受けて下さい。
- 吐しゃ物凝固剤をトイレなどに流さないで下さい。
- 吐しゃ物凝固剤は食べられませんので、小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 吐しゃ物凝固剤は、汚物全体にふりかけて1分間放置して下さい。全体を混ぜ固めてからディスポちりとりですくいあげて下さい。
- 処理後は、それぞれ裏返しになるように脱ぎ、ゴミ袋へ入れて下さい。

アズワン株式会社

■ 商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。