

取扱説明書

Instruction Manual

緊急用カッター

型番: ZD-SF-403 (8-8266-01)

ZD-SF-404 (8-8266-02)

目次

1. 注意	…	2
2. 内容物の確認	…	2
3. 各部の機能	…	2
4. 使用方法	…	3
5. メンテナンス方法	…	3
6. 仕様	…	4
7. 製品保証について	…	5

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

1. 注意

ご使用前には、本マニュアルをお読みください。

鋭利な刃を使用していますので直接、素手で刃を触らないでください。組立や分解には保護用の手袋を着用してください。

保管は、腐食性ガスのない、通気性のいい場所で、温度は 4～40℃、湿度は 85%以下の環境で行ってください。

2. 内容物の確認


以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

1. 緊急カッター本体	1 個
2. 替刃	1 個
3. 替えパッド	1 個
4. ピンセット	1 個
5. 清掃用はけ	1 個
6. 取扱説明書(本書)	1 冊


注) 内容物は予告なく変更する場合があります。

3. 各部の名称

ZD-SF-403

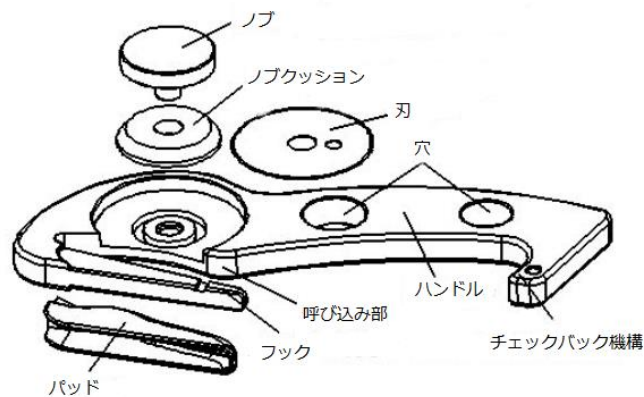


ZD-SF-404

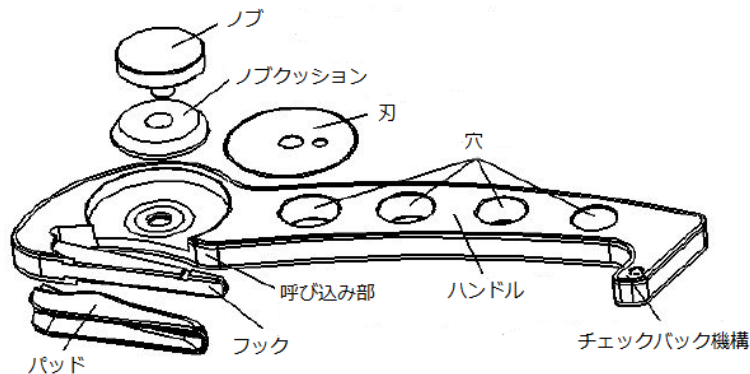

4. 使用方法

A. 組立

1. パッドを差し込みます。

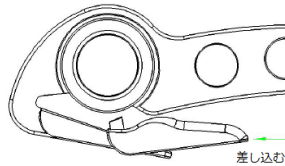

2. パッドをしっかり奥まではめ込み、バックルがカードスロットに入るようにします。



3. 刃をハンドルの上に置きます。
4. ノブクッションを刃の上に置き、ノブを締めて固定します。

B. 使用手順


1. ハンドルを持ちます。
2. 切断対象物(例えばシートベルト)を、呼び込み部とフックの間に通します。
3. 片手で切断対象物を持ち、もう片方でハンドルを引っ張り、刃で切断します。
4. 刃の切れ味が衰えた場合には、ノブを緩めて刃をまわし、未使用の刃の部分が出るようにします。
5. 刃の未使用部分が無くなりましたら、刃を交換します。(5. メンテナンス方法参照)

5. メンテナンス方法


- ・本体を分解してください。
- ・ピンセットやブラシ、及び洗浄液や水等で各部品を洗浄してください。
- ・75%のアルコールで消毒し、その後乾燥させます。
- ・刃の交換は、オプションの交換用替刃(品番 8-8266-11)をご使用ください。

6. 仕様

ZD-SF-403

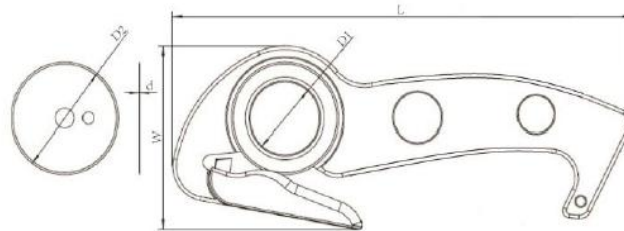

ZD-SF-404

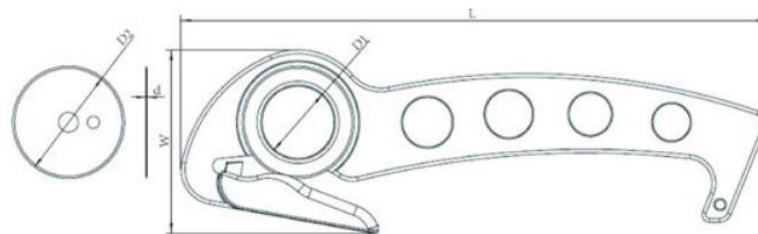

単位:mm

型式	ZD-SF-403	ZD-SF-404
品番	8-8266-01	8-8266-02
長さ(L)	185	235
幅(W)	70	70
刃直径(D2)	45	45
刃厚み(d)	≥ 0.2	≥ 0.2
ノブ直径(D1)	30	30

Made in China

*改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

7. 製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL :
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL :

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

アズワン株式会社

2015年10月第1版作成