

取扱説明書

Instruction Manual

navis*

セキュリティーPCカート

8-9910-01 本体ベーシックPINK
 8-9910-02 本体ベーシックBLUE
 8-9910-03 本体ハンガーネットPINK
 8-9910-04 本体ハンガーネットBLUE

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
 ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
 また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

使用上のご注意

- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- キャスターの取付けなど一部にネジを使っておりますので、ご使用前にゆるみがないか確認下さい。
- 床面が平滑なところで使用してください。凹凸のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。
- エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 無理な荷重は転倒や破損の原因になります。
- 安全に配慮して製造しておりますが、板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- 本体に薬品などが付着しましたらすぐに拭き取ってください。長時間放置しますと変色や腐食の恐れがあります。
- もし使用中に変形や曲がり、ねじの緩みなどによるガタツキや異音がした場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落により怪我をする恐れがあります。

お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。
- 漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる恐れがあります。

仕様

品番	型番	本体サイズ	付属品
8-9910-01	本体ベーシックPINK	全幅：500mm 奥行：550mm 全高：1050mm	アルティアハーフトレー浅型×2枚 アルティアハーフトレー深型×1枚 鍵×2個
8-9910-02	本体ベーシックBLUE		
8-9910-03	本体ハンガーネットPINK		
8-9910-04	本体ハンガーネットBLUE		

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません