

取扱説明書

Instruction Manual


navis*

イルリガードルスタンド(積み重ねタイプ)

8-8289-01 SAP2-H PINK
8-8289-02 SAP2-H BLUE
8-8290-01 SAP4-H PINK
8-8290-02 SAP4-H BLUE

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

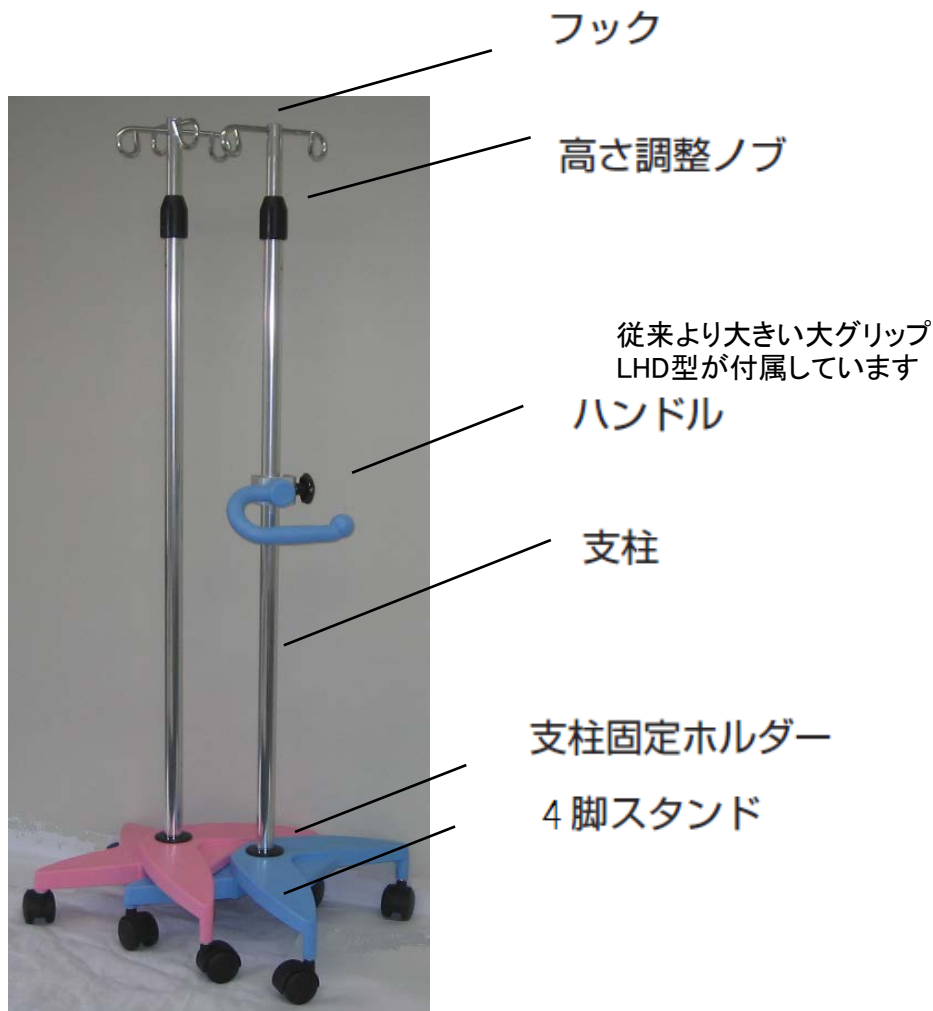

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 使用時は、高さ調整ノブをしっかり締めてあることを確認してください。
- フックに重いものを吊り下げないでください。支柱が急に落ちるなどして大変危険です。
- ネジがゆるむなどしてガタつきや異音がある場合には使用を中止し、点検してください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- フックの片側のみに重いものを吊り下げないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。

特長

- ハンドルは縦横どちらの向きでも取り付けできます。
- フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。



組立方法

- 1** 支柱にフックを差し込み、しっかりネジを締めて固定します。
- 2** 4脚スタンドにキャスター、支柱固定ホルダー、支柱を差し込みます。
- 3** 4脚スタンドの裏側から組立図のように大ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャーを通した固定ボルトで支柱を固定します。固定ボルトはスパナで締めてください。
- 4** クラмпにハンドルを縦または横方向にはめ込み、ネジで固定します。ネジはプラスドライバーで締めてください。
- 5** クラмпを支柱にはめ込み、固定ネジをしっかり締めて固定します。
- 6** 高さ調整ノブをゆるめて支柱を希望する高さにし、ノブをしっかり締めて固定します。

※ 工具（スパナ、プラスドライバー）は付属していません。

組立図

■連結部の構造について

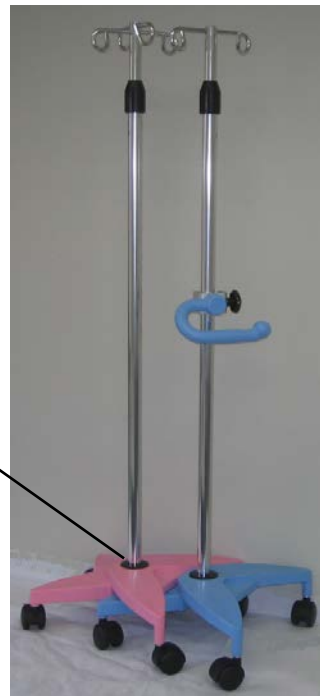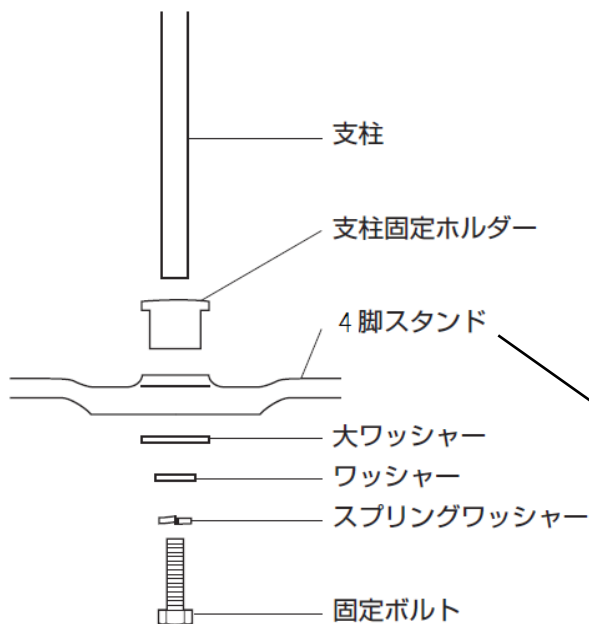

■支柱の固定について



4脚スタンドの裏側から
ボルトをスパナで締め付けます。




支柱固定ホルダーはスパナでの
締め付けにしたがって
徐々に中に入って行き
最後にしっかりと固定されます

■積み重ねタイプは写真のように積み重ねて置くことができるので保管場所を節約できて便利です



■付属ハンドル「大グリップLHD型」について

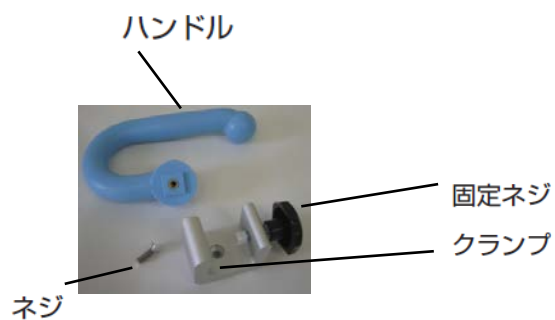

ネジの締め方で縦にも横にも設定できます

■ハンドルサイズ

上が小タイプHD型 8-4956-01 ピンク、 8-4956-02 ブルー
下が大タイプLHD型 8-8296-01 ピンク、 8-8296-02 ブルー

仕様				
品番	8-8289-01	8-8289-02	8-8290-01	8-8290-02
型番	SAP2-H PINK	SAP2-H BLUE	SAP4-H PINK	SAP4-H BLUE
フック部	2本架		4本架	
色	ピンク	ブルー	ピンク	ブルー
材質	支柱／アルミニウム、ベース／PP(ポリプロピレン)、 ハンドル／PP(ポリプロピレン)・アルミニウム			
サイズ	ベース径X全長: $\phi 465 \times 1250 \sim 2000\text{mm}$ 支柱パイプ径: 上部/ $\phi 22.2\text{mm}$ 、下部/ $\phi 27.0\text{mm}$ ハンドル取り付け可能径: $\phi 21 \sim 30\text{mm}$ フック横幅: 178mm、ハンドルLHD型は付属しています			
重量	2.6kg		2.7kg	

Made in Taiwan

<交換用ハンドル大タイプLHD型>

ピンク 型番 LHD-P (品番8-8296-01)
 ブルー 型番 LHD-B (品番8-8296-02)

保証規定	保証書																
<p>(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。</p> <p>(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 <p>(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。</p> <p>(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。</p>	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table> <tr> <td>品名</td><td>イルリガードルスタンド(積み重ねタイプ)</td></tr> <tr> <td>型式</td><td>SAP2-H PINK, SAP2-H BLUE SAP4-H PINK, SAP4-H BLUE</td></tr> <tr> <td>保証期間</td><td>お買い上げ日より1年間</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>お名前</td><td>様</td></tr> <tr> <td>ご住所</td><td>TEL.</td></tr> <tr> <td>取り扱い店名</td><td>担当者印</td></tr> <tr> <td>住所</td><td>TEL.</td></tr> </table>	品名	イルリガードルスタンド(積み重ねタイプ)	型式	SAP2-H PINK, SAP2-H BLUE SAP4-H PINK, SAP4-H BLUE	保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名	イルリガードルスタンド(積み重ねタイプ)																
型式	SAP2-H PINK, SAP2-H BLUE SAP4-H PINK, SAP4-H BLUE																
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)



問い合わせ専用 URL <http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社

第1版2015年1月作成