

取扱説明書

Instruction Manual

ストーマ用肌着

STM-S STF-S

STM-M STF-M

STM-L STF-L

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。


お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

● 取扱い注意

- ・ 本商品を、火気及び加熱されたものの近くには絶対に置かないで下さい。

商品図

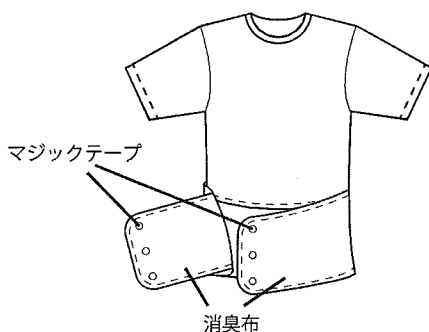

● 特長

- ・ ストーマ装具（パウチ）が肌に直接当たらない様に前身頃に切り込みが入っています。
- ・ 裏面の消臭布で消臭効果があります。

● 洗濯方法/洗濯時の注意

- ・ マジックテープを留めた状態で、洗濯して下さい。
- ・ 乾燥機は60℃までご使用いただけます。
- ・ 形を整えてから陰干しして下さい。



ネット使用



● 材質

本体/綿100%


腹帯消臭布/綿67.5%、ポリエステル32.5%

● 入り数：1枚


● 内容物：本体、取扱説明書

使用方法


① シャツを上から羽織ります

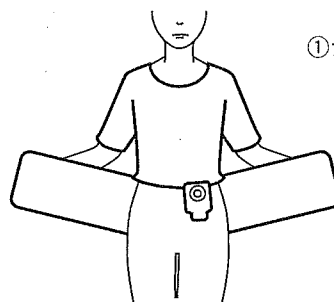

② 左の帯を閉じ、ストーマのパウチを帯の上に出します。

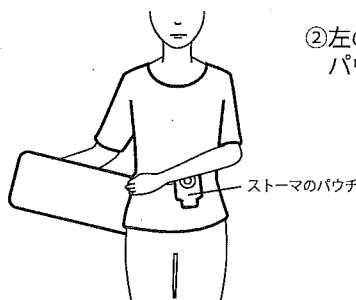

③ もう片方の帯を閉じて完成です。

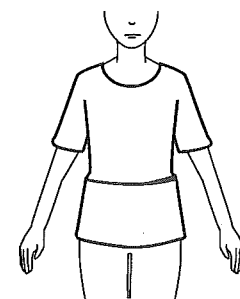

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX

0120-700-763

問合せ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません