

取扱説明書

Instruction Manual

足首抑制帯[幅広タイプ]

AY-H

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

● 取り扱い注意

- ・ 当製品は、患者様の危険な動きを防止することを目的とする商品です。
- ・ 装着方法が不適切な場合、生命・身体に重大な影響を及ぼす可能性があります。医師・専門家とご相談の上ご使用下さい。

● 特長

- ・ 形状が扇形になっているので動いてもズレにくくなっています。
- ・ 中の綿は半永久的にへたらない綿を使用しています。洗えるので、清潔にお使い頂けます。
- ・ テープの幅が広いものを使用しています。

● 洗濯方法/洗濯時の注意

- ・ 乾燥機のご使用は避け下さい。
- ・ 事前にマジックテープを留めてから洗濯をして下さい。



ネット使用




● 材質

本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%
ベルト/アクリル100%
マジックテープ/ナイロン100%
金具/アルミ


● 入り数：1双

● 内容物：本体、取扱説明書


使用方法

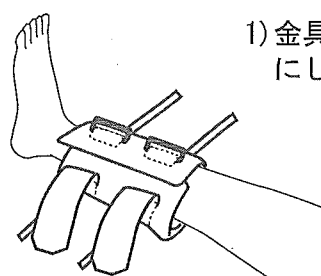

- 1) 金具やベルトがある面を裏にして、足首を包みます。

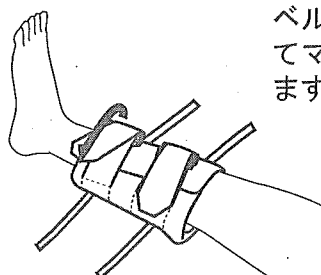

- 2) サイズに合わせて金具にベルトを通し、折り返してマジックテープで留めます。

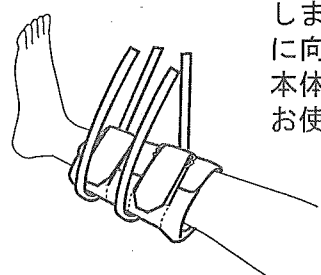

- 3) ひもをベット柵などに固定します。ベルトのある方向に向かって固定するとより本体の消耗が少なく、永くお使いいただけます。

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX

0120-700-763

問合せ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません