



ラウンドカート マル型 (品番: 8-2163-01)
 ボート型 (品番: 8-2163-02)

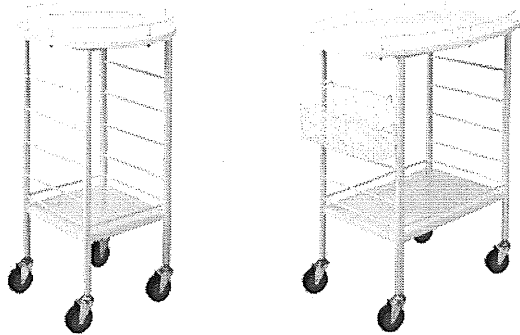

マル型

ボート型

※写真のラックは別売です。

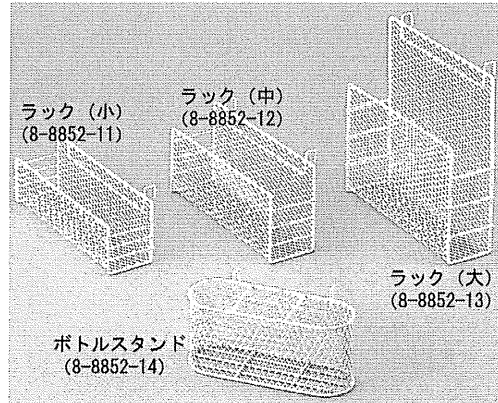

—オプション部品(別売)—

ラック(小・中・大)、ボトルスタンド

お買い上げ有り難うございます。
 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
 本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
 本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知らるために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

△ 注意



本商品に、クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものを絶対に使用しないでください。

取扱注意事項


- ・移動時にはエレベーター等の乗降の際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ・平坦な床でご使用ください。
- ・分解・改造はしないでください。

特長

- ・やわらかいフォームの天板を持つ回診車です。
- ・中棚には転落防止用の柵付きです。(天板は一部に柵付き)

仕様

- ・最大外形寸法: マル型 / $\phi 450 \times 845\text{mm}$ 、
ボート型 / $700\text{mm} \times 450\text{mm} \times 845\text{mm}$
- ・有効作業寸法: マル型 / 約 $\phi 420\text{mm}$ 、
ボート型 / $700\text{mm} \times \text{約}300\text{mm}$
- ・材質: 天板 / メラミン化粧板、キャスター / ウレタン
本体 / スチール(粉体塗装)
- ・天板高さ: マル型・ボート型 / 807mm
- ・重量: マル型 / 8.8kg、ボート型 / 12kg
- ・キャスター: $\phi 75\text{mm}$ (ストッパー無)
- ・棚間隔: マル型 / 約485mm、ボート型 / 約485mm
- ・耐荷重: マル型 / 天板10kg、棚10kg、ボート型 / 天板20kg、棚、20kg

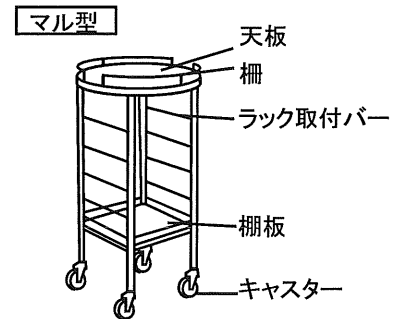

〈お手入れについて〉

清掃は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

AS ONE アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875
 FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~午後5時30分
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません