

ポールクランプ

(8-2158-01)	NPC-ST	スタンド
(8-2155-01)	NPC-J	上肢台
(8-2156-01)	NPC-OB	汚物缶
(8-2157-01)	NPC-T	トレー

お買い上げ誠にありがとうございます。
 取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

警告



禁止事項

- 本商品を用途以外には使用しないでください。倒れたり破損することで、けがの原因となります。
- 改造及び分解はしないでください。倒れたり破損することで、けがの原因となります。
- 商品に座ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒しけがをすることがあります。

注意



禁止事項

- 商品は水平で安定したところに設置してください。転倒、破損により、けがの原因となることがあります。
- 乱暴な取り扱いをしないでください。転倒、破損により、けがをすることがあります。
- 近くに火気又は加熱物質を置かないでください。
- 本商品を屋外では使用しないでください。

特長

- ・処置用盤台として上部にステンレストレーをセットした移動スタンドです。
- ・オプションのポールクランプ類とセットで使用目的にあわせた形態がとれます。
- ・キャスター付きで移動も楽です。
- ・ポールは任意の高さに調整できます。
- ・ポールクランプはポール径がφ25mmであれば回診車や他のポールを有するものに取り付けることができます。

仕様

- ・NPC-ST スタンド : キャスター(φ50mm/ウレタン)、トレー(389×270×16mm/ステンレス)
- ・NPC-J 上肢台 : マット(φ160mm/表皮PVCレザー/中身ウレタン)
- ・NPC-T トレー : トレー(210×170×31mm/ステンレス)
- ・NPC-OB 汚物缶 : 汚物缶(φ160×178mm/ステンレス)
- ・共通仕様 : 本体/スチール粉体塗装色、クランプ/アルミダイキャスト(スタンド除く)

お手入れ方法

- ・本商品に、クレンザー(磨き粉)、有機溶剤(シンナー、トルエン、酢酸等)及び強酸類等の薬品は、絶対に使用しないでください。
- ・汚れを落とす場合には、うすめた中性洗剤を使用し拭きとってください。

2010年4月 初版

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX


0120-700-763

問合せ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>


受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

NPC-ST スタンド

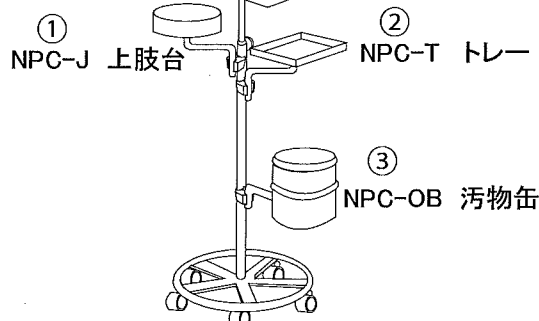

＜クランプトレーの取付方法＞

※上記ポールクランプシリーズ①②③共通の取付方法です。

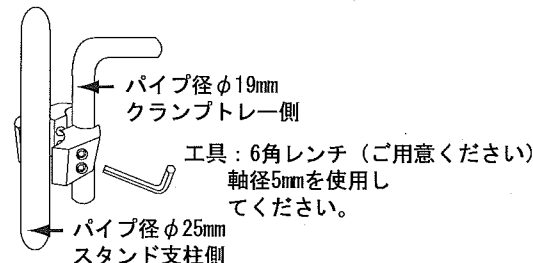

- ①クランプの2本の六角ボルトを緩めます。
 ※クランプはφ25とφ19mmのポールに適合する2つの半円形の固定枠があります。
- ②スタンドのどの位置にトレーをセットするか決めます。
- ③決めた位置にクランプを持ってきます。
- ④固定枠φ25mmはスタンドのパイプに、φ19mmはクランプスタンドのパイプをはさむようにセットします。
- ⑤クランプが歪まないようにしながら六角ボルトをしっかと閉めてください。
- ⑥トレーを枠にはまるように乗せて完了です。

※注意

六角ボルトを締めるときは2本を交互に締めながら最後に両方をしっかりと締め、緩みのないことを確認してください。