

診察台枕カバー（フュージョン）


商品コード:8-2133-01 MMC-F

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

MMC-F

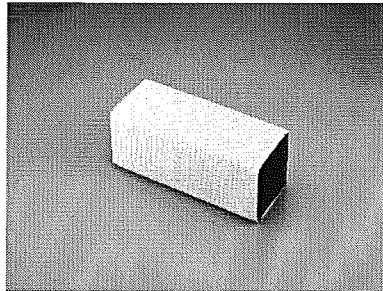

特長

- ・軽く通気性のあるフュージョンメッシュ素材です。
- ・立体メッシュ構造ですので蒸れなくさわやかな肌触りです。


洗濯時の注意

- ・塩素系漂白剤ご使用はお避けください。
- ・蛍光増白剤を含む洗剤をご使用されますと、色ムラや変色の恐れがございますので、ご注意ください。
- ・洗濯機を使用する場合はネットに入れて洗濯してください。
- ・縮み・変形・破損の原因となるため、高温乾燥機のご使用はお避けください。

仕様

- ・材質:フュージョン(ナイロン約74%、ポリエステル約26%)
- ・サイズ:470×280mm

〈取付け方法〉

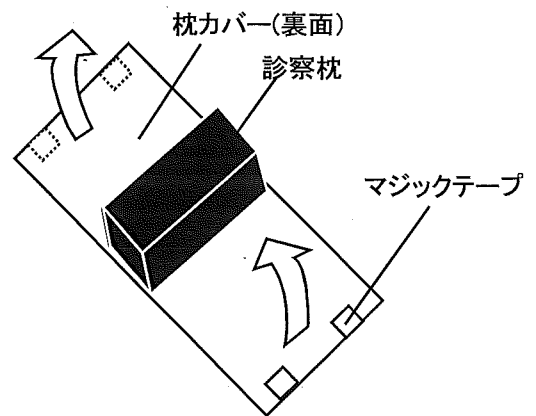

- ①枕カバー裏面を上に向け置きます。
- ②診察枕を上のにせます。
- ③両面のマジックテープで枕を巻くように固定します。

2010年3月 初版

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル	 0120-711-875	
	FAX	0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		