

取扱説明書

ローハイトイルリガードルスタンド SLI (0-9974-01)

組立方法

- 1、2本ある角パイプをL型になるよう挿し込み、ノブネジにて締め込みます。
- 2、L型になった角パイプの上面にある丸パイプにノブネジ付き丸パイプを奥まで挿し込み、ノブネジにて締め込みます。
- 3、最後にガードルフック付きのパイプをL型の内側に向くよう挿し込み、高さを調整したのちノブネジにて締め込みます。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② 転倒しないようL型フレームを布団の下に挿し込むなどして使用して下さい。
- ③ ガードルフックは必ずL型フレームの内側になるよう取り付けてください。
- ④ 定期的にノブネジのゆるみがないかをご確認のうえ使用して下さい。
- ⑤ イルリガードルスタンド以外の目的に使用しないで下さい。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル:0120-711-875

FAX:0120-700-763

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません