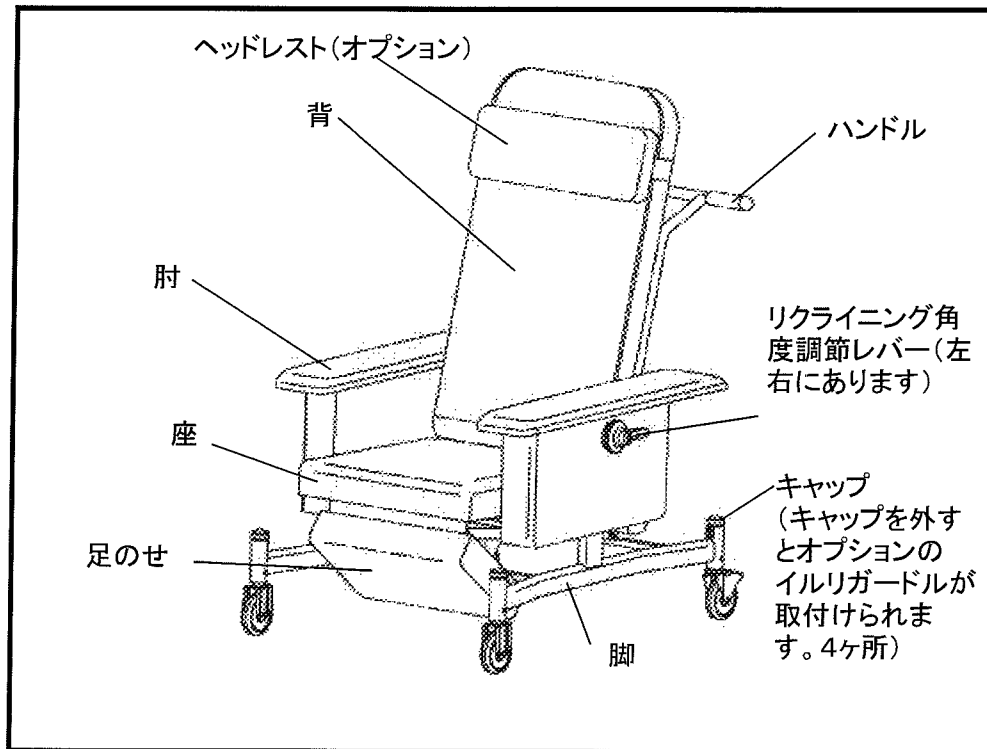


保存用

リクライニングチェア NRC-01 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。



もくじ

○△ 警告 △ 注意	1
○使用方法	2
○品質表示	3

この取扱説明書は大切に保管してください。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2004年 7月 第1版

安全のためお守りいただくこと

⚠ 警告

- 可動部分の隙間や穴に手を入れないで下さい。手をはさんでケガをすることがあります。
- 子供に操作させないで下さい。手をはさんでケガをすることがあります。

⚠ 注意

- 火のそばに近ずけて使わないで下さい。火災になることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使わないで下さい。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないで下さい。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたままで座らないで下さい。体重が支えられずに、けがをすることがあります。
- 屋外、水のかかる場所、水中で、使わないで下さい。故障やサビの原因になります。
- 直射日光、熱が当たる場所、暖房器具の近くでは使わないで下さい。変色や変形したりする事があります。
- 使用時はキャスターのストッパーをかけて使ってください。
- 肘部には座らないでください。転倒やけがをすることがあります。
- 人がすわったまま、移動させないでください。段差などで転倒することがあります。
- 屋外、水中で、使わないで下さい。故障やサビの原因になります。

◎ 製品に異常が生じたときは、だだちに使用を中止し、ご購入店にご相談ください。

注意の種類の規定： JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)
による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠ 警告 — 死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ 注意 — 傷害を負う可能性が想定される、か拡大物的傷害のみの発生が想定される場合。

お手入れの方法

≪樹脂部品・パイプ部品≫座・背(ビニールレザー)等

① 柔らかい布でからぶきして下さい。

② 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤(1%~3%)をつけよく絞った布で汚れをふきとり、洗剤が残らないようによく絞った布で水ぶきした後に①のようにからぶきして下さい。

使用方法

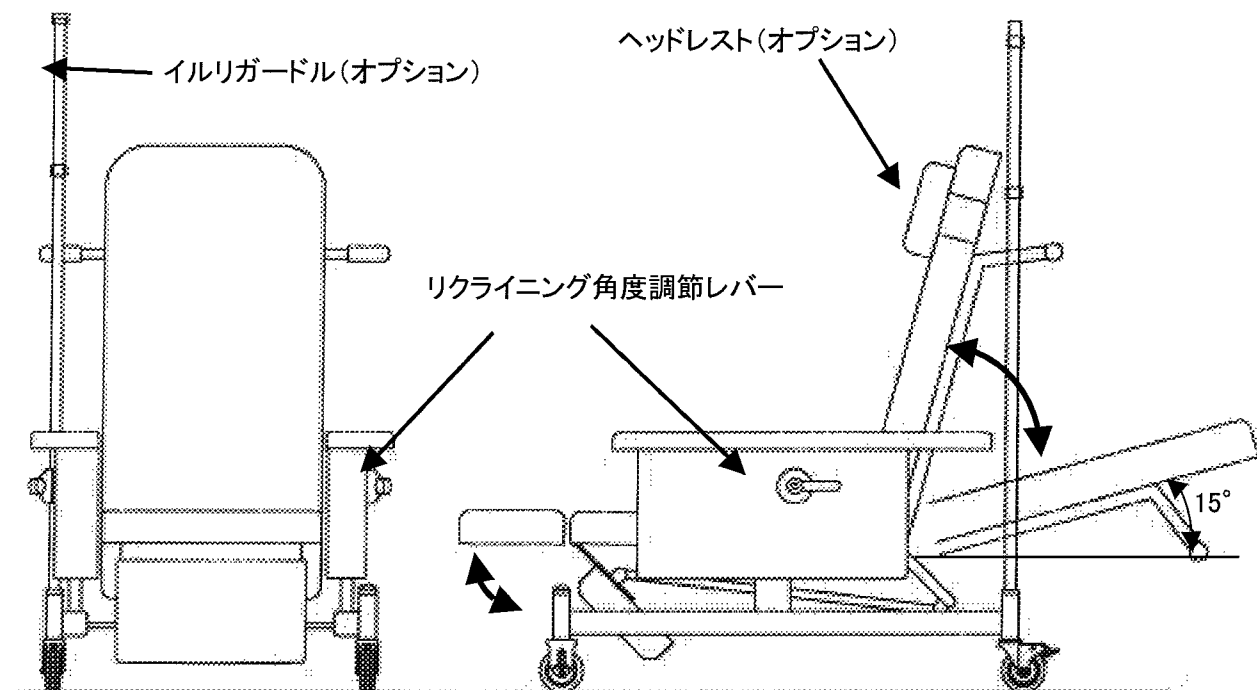
リクライニング角度の調節

背を後傾させるるとき

左右肘かけ側部のリクライニング角度調節レバーを上引きします。レバーを上引きながら背もたれのハンドルを押すと自由に後傾します。希望の角度まで後傾したところでレバーをはなすと、背もたれは固定します。

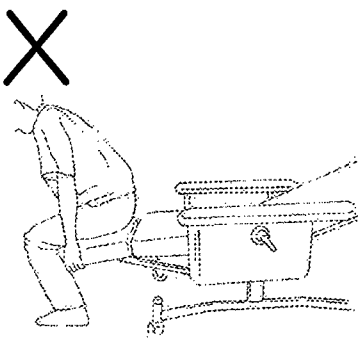
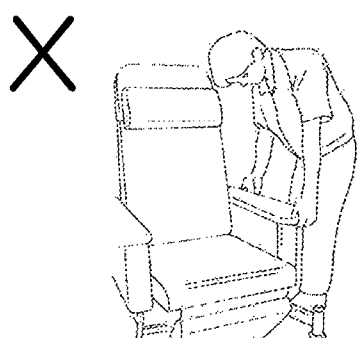
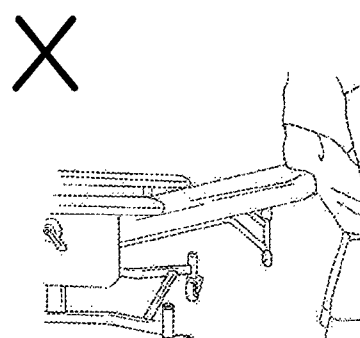
背を起こすとき

再び左右肘かけ側部のリクライニング角度調節レバーを上引きながら背中をはなすか背もたれのハンドルを引き上げると、背もたれが起きてきます。希望の角度まで起きたところで、レバーをはなすと、背もたれは固定します。



※背リクライニングは、座面はフラット・背もたれは15°の位置まで倒すことができます。

⚠ 注意 下記の行為は絶対にしないでください。

フットレストに座らないでください	肘掛を持ち上げないでください	背もたれに座らないでください
		

品質表示

①寸法・質量

単位：mm

外 形 寸 法						
品番	全幅	全奥行	全高	肘高	座面の高さ	質量 kg
NRC-01	840±15	1070±25	1300±20	630±15	445±10	61.0

②構造部材

部品名	材質
座部	ウレタン
座部芯材	合板
背部	ウレタン
背部芯材	合板
脚部	金属(鋼) STKM-11A相当
肘部	ウレタン
肘部芯材	金属(鋼) SPHC
フットレスト	ウレタン
足のせ芯材	合板
張り材	ビニールレザー
キャスター	φ100単輪ゴムキャスター

※肘カバーとヘッドレストカバーは、オプションにて準備しております。
お問い合わせください。

