

幼児用身長測定計：型式 HYFT-900 取扱説明書

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい


1. 製品仕様

入力電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：待機時 0.8W 測定時 2.5W
測定範囲：身長 0～90.0cm（±0.2cm）
使用周囲温度／湿度：10℃～30℃ 60%以下

2. 製品構成

測定器 ———— 1 セット
ヒューズ ———— 1 個
電源コード ———— 1 本

3. 製品の寸法

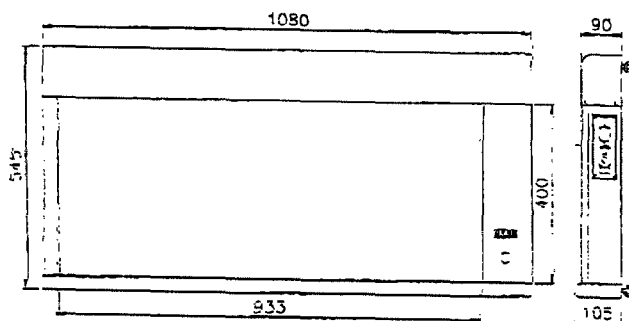


4. 操作パネル部

navis
幼児用身長測定計
HYFT-900

測定方法


- ・幼児を測定可能な範囲に置かせて下さい。
- ・幼児が天井を突くように促さず、足裏と壁を軽く押さえ、
- ・身長測定ボタンを押すと2～3秒後に測定が始まり、約5秒で表示します。

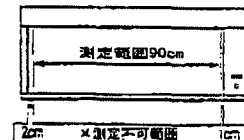

- ①測定可能な範囲はこの黄色部分 90cm範囲です。幼児はこの中に入れてください。
- ②オレンジ部分は測定不可範囲です。この部分は測定できません。
- ③測定時、体が当たっていたり、動いたりすると測定誤差が生じます。

身長測定表示部：
0.1cm 単位で表示を
します。

身長測定スイッチ：
測定準備完了後ボタン
を押すと、約3秒後に
身長測定を開始します。

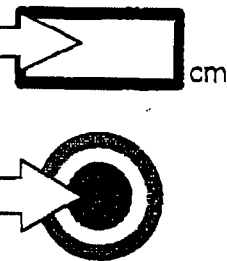

5. 安全にお使い頂くために

- ⚠ 危険：次の表示を無視し、取扱いを誤ると人が危険にさらされる恐れがあります。
- ⚠ 警告：次の表示を無視し、取扱いを誤ると人に傷害を与えたり財産に損害をもたらす恐れがあります。
- ⚠ 注意：正しい取扱いをしないと製品自体に影響を与えることがあります。


製品使用前に以下の事項をよく読んで、正しく使用して下さい。

- ⚠ 危険：感電事故を防ぐため
 - (1) 漏電による事故を防ぐためアースが付いているコンセントを使用して下さい。
 - (2) ネジ固定部は解体しないで下さい。
 - (3) 電源コードを抜くときはコードを握って引抜かないようにして下さい。
- ⚠ 危険：火災、感電事故を防ぐため
 - (1) 煙が出たり、変な匂いしたりするときは使用を中止して下さい。すぐに電源コードをコンセントから抜いて下さい。
 - (2) お客様の修理は危険ですので、購入先へご返却下さい。
- ⚠ 警告：傷害、損害事故を防ぐため

装置のカバーを開けて、内部に触らないで下さい
- ⚠ 注意：製品を損傷させないため
 - (1) 電源電圧、使用環境を守って下さい。
 - (2) 装置・計測部に衝撃を与えないように注意して下さい。

6. 設置時注意事項

- ◎ 装置の分解及び改造は動作又は測定値に対して誤差または故障の原因となります。
- ◎ 移動時は装置の安全状態を確認して動かして下さい。
- ◎ 装置の上にはものを置かないで下さい。

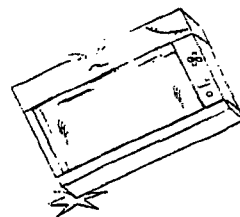

7. 正しい測定方法

- ◎ 測定するとき、幼児が動かないように注意して下さい。
体が動いてしまうと身長測定に誤差が発生することもあります。
- ◎ 測定前に、幼児の靴と帽子を脱がして下さい。
- ◎ 厚着は脱がして下さい。
- ◎ 身長を測定するとき：
身長測定スイッチを1回押すと、約3秒後ピーという音と共に身長の測定を始めます。
幼児の頭と足首を押さえてまっすぐにしてあげると、より正確な測定ができます。
- ◎ 身長表示部に測定値が表示されると測定は終わります。
幼児を安全に身長計から降ろして下さい。



8. 簡単な故障診断

症状	点検方法
電源を入れても、操作パネルが表示しない時	◎ 電源プラグは、正常にコンセントに入っていますか ◎ 電源スイッチに赤色ランプがついていますか
測定値が異常な時	◎ 幼児の体はまっすぐでしたか (膝は伸びていましたか) ◎ 幼児の位置は、測定台と平行になっていましたか ◎ 反射板または赤色の窓に異物がついていませんか

ご購入頂きました製品は、お客様にご満足頂けるよう徹底したサービスを提供させて頂きます。

もし、ご使用中、故障が発生した場合には取扱説明書をご確認の上、ご購入頂きました販売店へご連絡をお願い致します。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは…

カスタマー相談センター

フリーダイヤル TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
二・日・祝日及び弊社休業日にはご利用できません