



取扱説明書

トレーワゴン NST-A4N (0-5612-11)

特徴

- ネブライザーや吸引器等の小型器材の運搬に適したコンパクトサイズです。
- 上段、下段の棚が取り外しできる樹脂トレータイプになっていますので、簡単に洗い替えができます。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 棚板一段につき耐荷重は15kgですのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑤ 上段だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し転倒する恐れがありますのでご注意願います。
- ⑥ トレーは樹脂製ですので、強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。

 アズワン株式会社	
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター	
フリーダイヤル	 0120-711-875
	F A X 0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません	