


# 《取扱説明書》


品 名	簡易点滴処置車 / 点滴処置台		
-----	-----------------	--	--

型番 寸法	ET-08FN	O-4595-11	670*430*1570Hmm
	ET-10F	O-5679-01	750*450*1600Hmm


<p>安全上のご注意</p> <p>！警告！</p> <p>怪我等の原因となります</p> 	<p>床面が平滑なところでご使用ください。凸凹状態のところでの押し歩きは本体やキャスター等の部品の破損の原因となります。</p> <p>誤った使用や、無理な荷重等は破損の原因となります。</p> <p>天板等金属板の端部に直接触れないで下さい。手などの怪我等の原因となります。</p> <p>移動の際にはキャスターのストッパーの解除を確認してから移動してください。ストッパーをかけたままご使用になりますとキャスターが破損、脱落する恐れがあります。</p> <p>本体のゆがみやキャスター等の部品に異常がないか定期的にご確認ください。</p> <p>上記の注意点を守り異常やガタツキがないか確認のうえ正しくご使用ください。</p> <p>もし使用中に変形や曲がり、ネジの緩みなどによるガタツキや異音が発生した場合には直ちに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。そのままご使用になりますとキャスターの脱落や本体の破損により、怪我等の原因となります。</p>
---	--

使用用途	点滴交換、患者別の配付などに使用します。ET-08FNはアルティアトレー浅型、深型が各1個ずつ付属し器材を収納することが出来ます（アルティアトレーに付属の白い樹脂ストッパーは、本商品には使用いたしません）。ET-10Fは樹脂製引出が3個付き、器材の収納にご利用いただけます。		
材 質	ワゴン本体	ステンレスNSS442M3（JIS規格 SUS430J1L）	
	吊り下げアーム	SUS304	
	442M3はニッケルを含まずにSUS304と同等の耐食性を有する材質で一般には洗濯機のドラムや自動車の排ガス処理部品などで実績のある材質です。		
キャスター	φ75mm対角ストッパー付		
フック数	ET-08FN	上下各4本（計8本掛）	
	ET-10F	上下各5本（計10本掛）	

組立方法	①	ワゴン本体と吊り下げアームが別梱包になっているのをご確認下さい
	②	本体についているボルト、ワッシャーをはずしアームを取り付け再度ボルト、ワッシャーで締め付けます。


**アズワン株式会社**

商品に関するお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル >  0120-711-875

> FAX 0120-700-763

問合せ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません