



取扱説明書



ファクションカート SDC (0-3302-01)

特徴

ディスポ針やディスポ注射器が場所をとることなく整理ができ、ワゴンの天板上のスペースも広く、処置等に効率的です。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 棚板一段につき耐荷重は30kgですのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑤ 上段だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し転倒する恐れがありますのでご注意願います。
- ⑥ 引き出しとケースは樹脂製ですので、強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。
- ⑦ 処置台として使用する際は、キャスターのストッパーを掛けてください。

 アズワン株式会社	
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター	
フリーダイヤル	 0120-711-875
	F A X 0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません	