


ベッドミラー取扱い説明書

各部のなまえ

ご注意

【ミラー部分の材質は安全上ガラスを使わず、アクリル樹脂なので鏡面を拭く場合、柔らかい布に少し水を含ませて軽く拭いて下さい。化学物質などを使いますと変色する事がありますので、ご使用にならないで下さい。】

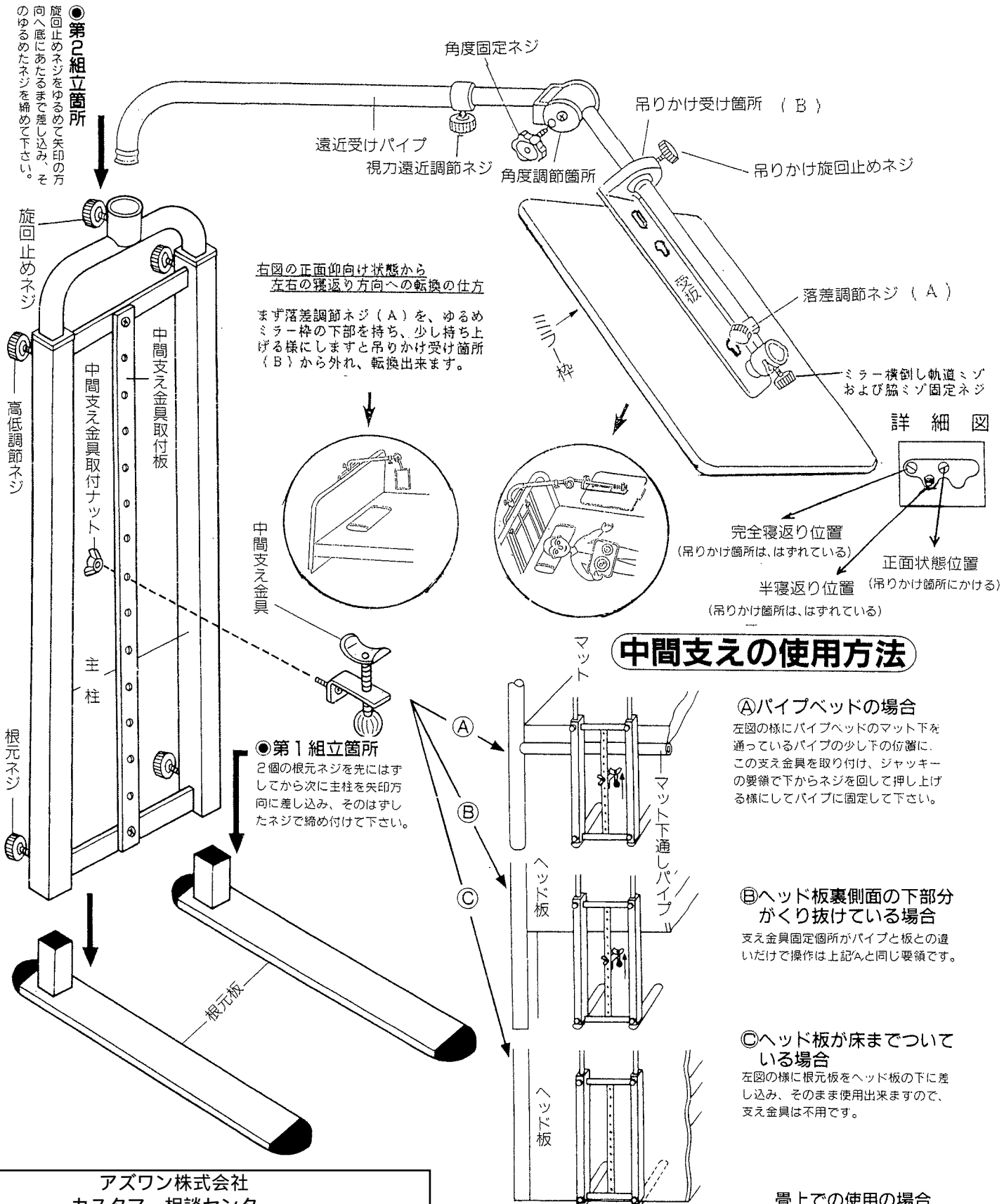

右図の正面仰向け状態から
左右の寝返り方向への転換の仕方

まず落差調節ネジ(A)を、ゆるめ
ミラー枠の下部を持ち、少し持ち上
げる様にしますと吊りかけ受け箇所
(B)から外れ、転換出来ます。

中間支え金具

●第1組立箇所
2個の根元ネジを先にはず
してから次に主柱を矢印方
向に差し込み、そのはずし
たネジで締め付けて下さい。

中間支えの使用法

①パイプベッドの場合

左図の様にパイプベッドのマット下を通っているパイプの少し下の位置に、この支え金具を取り付け、ジャッキの要領で下からネジを回して押し上げる様にしてパイプに固定して下さい。

②ヘッド板裏側面の下部分がくり抜けている場合

支え金具固定箇所がパイプと板との違いだけで操作は上記①と同じ要領です。

③ヘッド板が床までついてる場合

左図の様に根元板をヘッド板の下に差し込み、そのまま使用出来ますので、支え金具は不用です。

畳上での使用の場合

◎図の要領で布団の下に根元板を差し込んで下さい。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間 : 午前9時~午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。