

☆ 取扱説明書 ☆

注：組立商品

品 名 MRI室用注射台 《 KMI 》

I. 使用用途と特徴及び取扱上の注意

1. 使用用途 MRI室専用の注射台として使用します。
2. 特 徴 ステンレス製で耐久性に優れいつまでも美しく使用できます。
MRI室専用でご使用ください。
3. 取扱上の注意
 - ① 床面が凸凹状態のところ、又は傾斜のところでの使用は、注射台自体の安定が悪い原因となりますので、その様な場所での使用はしないで下さい。
 - ② 本注射台は組立商品となっておりますので、組立時にぐらつきのないようにボルト及びノブネジを強く締めセットしてください。
4. 組立方法
 - ① 購入時に、脚部と外パイプ(太い方)、中パイプ(細い方)、注射台マットの4部品に分け箱に入っています。
 - ② 外パイプ下にあるボルトをはずし、脚部の中心に外パイプを合わせ、脚部裏側よりボルトにワッシャーを入れて、パイプと脚部が完全に固定するまで、強く締めて下さい。
 - ③ 注射台マット裏側中央のナットにワッシャーが布テープで固定してあるものを布テープを外し、マット裏側のナットにワッシャーをはめ、中パイプを完全に固定するまで強く締めて下さい。
 - ④ 最後に脚部と外パイプを取付けた部分に、マットと中パイプをセットしたものを、外パイプに挿入して、高さを調節の上、外パイプ上部横にあるノブネジを締め固定して下さい。

II. 材質及び規格

1. 材 質 本体・ベース／ステンレスSUS304
上 部 マ ッ ト／ビニールレザー張り(スポンジ入り)
2. 寸 法 脚 部 寸 法／(幅)400×(奥行)400×(高さ)720～1000mm
マットサイズ／(幅)150×(奥行)230

▲アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL：0120-711-875（フリーダイヤル）

FAX：0120-700-763（フリーダイヤル）

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。