


歩行補助車 0-5601-01

この度は、ご購入頂き誠に有難うございます。安全にお使い頂くために、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、説明書は大切に保管のうえ必要に応じお読みください。

全体図

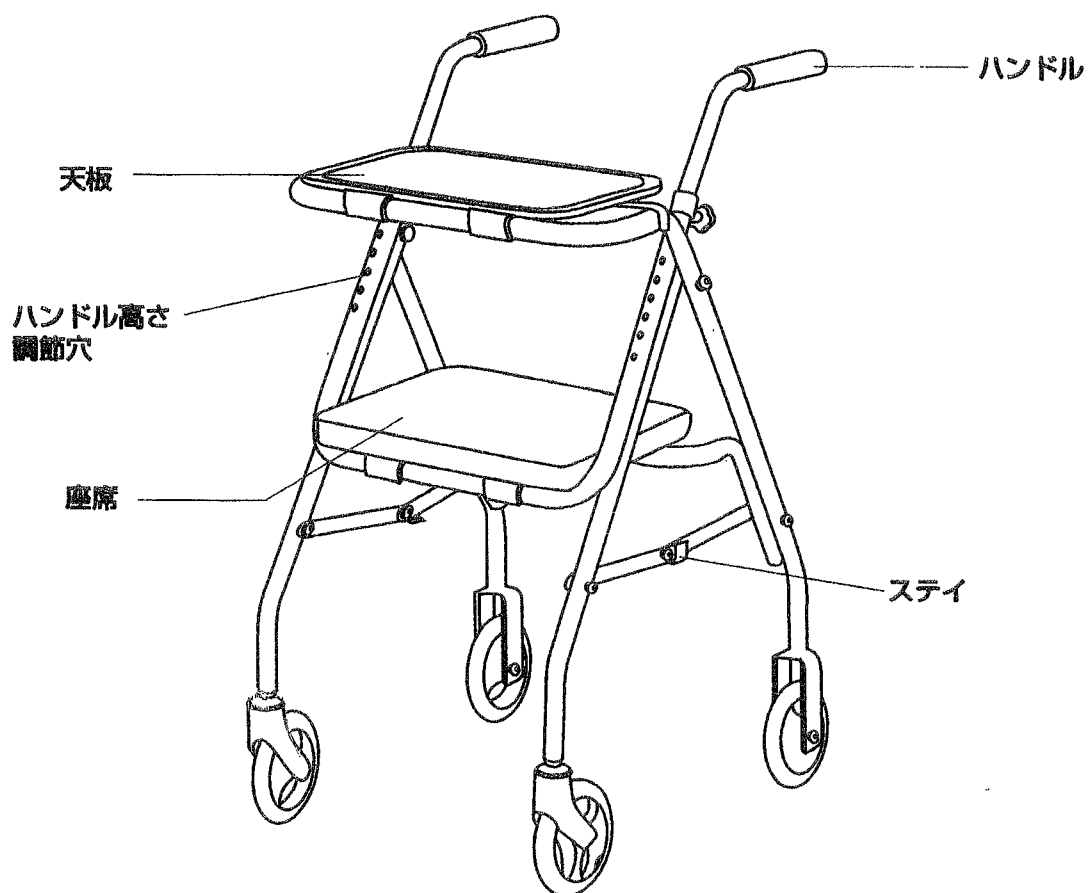

使用方法

1. 折りたたみ状態の場合、前輪と後輪を最大限までひろげ、座席の下にある左右のステイ金具を押さえきって延ばします。
2. 使用前に適当な高さに調節し、ノブをしっかりと締めてください。
3. グラツキがなく、安定した動きを確認してから、ご使用ください。
4. 歩行中疲れましたら、座席にお座りください。

△ 使用上の注意と警告

- 歩行器以外のご使用はお止めください。
- 初めてご使用するときや、不慣れのため一人での歩行が無理な場合は、必ず介助者立ち会いのうえご使用ください。
- ご使用の際は、ゆっくりと進むよう心がけてください。
- 体を必要以上に持たれかけさせることは、歩行器のバランスをくずすことになり、転倒する危険がありますのでお止めください。
- 長時間ご使用にならない場合は、出来るだけ折りたたんで保管してください。
- 天板の上には、軽くて落ちにくい物を載せてご使用ください。

仕 様

外 径 寸 法	(幅) 500× (奥行) 535× (ハンドルの高さ) 925~1025mm
折 り た た み 寸 法	(幅) 500× (奥行) 380× (ハンドルの高さ) 950~1050mm
有 効 内 寸 法	400mm
天 板	(幅) 400× (奥行) 280mm
座 席	(幅) 365× (奥行) 280mm
材 質 / シ ー ト 部	合成レザー張り
材 質 / 脚 部	アルミニウム
高さ調整/ハンドルの高さ	20mm間隔で5段調節

■商品についてのお問い合わせは…

アズワン株式会社
カスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間 : 午前9時 ~ 午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

お買上げ年月日	平成 年 月 日
購入先店名	
住 所	
お電話番号	

販売店さまへ 上に必ずご記入のうえお渡し下さい。