


タンカースト(簡易担架型ストレッチャー)

0-5595-01

この度は、ご購入頂き誠に有難うございます、安全にお使い頂くために、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、説明書は大切に保管のうえ必要に応じお読み下さい。

全体図

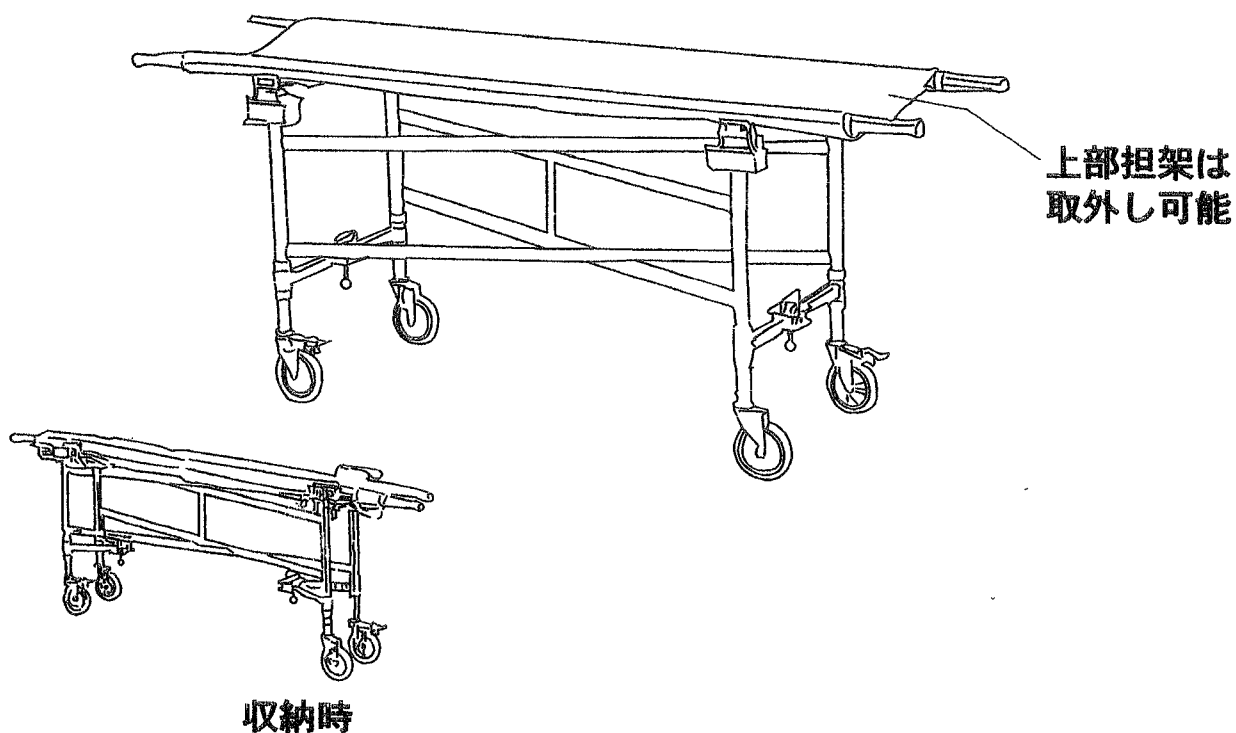

使用方法

- ①ストレッチャー(台車)をひろげますとストッパーが掛かります。確実にストッパーが掛かっていることを、必ず確認してください。
- ②担架を載せる時は、担架の4個の脚をストレッチャー(台車)の受け金具に載せ、確実ににはめ込まれていることを、必ず確認してください。
- ③段差のある所では、慎重に動かしてください。
- ④ストレッチャー(台車)の収納(折りたたみ)は、下端にある2つの収納レバーを引き上げて下さい。
- ⑤保管は、ストレッチャーを折りたたみ、邪魔にならない場所に置いてください。
- ⑥担架は取り外し式ですので、担架単体として使用できます。

△ 使用上の注意と警告

- ①ストレッチャー(台車)は確実に組立てられていることを確認してください。担架を載せる時は常に、念入りに確認してください。
- ②ストレッチャー(台車)に担架を載せた後、確実に載っていることを必ず確認ください。
- ③無理、乱暴な使用は絶対にしないでください。ストレッチャーの転倒、担架の脱落等が考えられ大変危険です。
- ④使用しないときは、降りたたんで邪魔にならない場所に保管ください。折りたたみますと、倒れやすくなりますので、特にご注意下さい。

仕様

外 径 寸 法	(幅) 540×(奥行) 2230×(高さ) 788mm
キ ャ ス タ ー	φ125mm、対角ストッパー付
材 質 / 台 車 部 / 担 架 部	フレーム…アルミ製、交差金具…ステンレス製 アルミ製パイプ、ビニール製帆布
サ イ ズ / 台 車 部 / 担 架 部	(幅) 565×(奥行) 1300×(高さ) 712mm (幅) 540×(長さ) 2030mm
折りたたみサイズ/台車部 /担架部	(幅) 350×(奥行) 1380×(高さ) 712mm (幅) 約180×(長さ) 2030mm

アズワン株式会社
カスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

お買上げ年月日

平成

年

月

日

購 入 先 店 名

住 所

お 電 話 番 号

販売店さまへ 上に必ずご記入のうえお渡し下さい。