


Instruction Manual

取扱説明書

車輪用ブラシ

この度は、ご購入頂き誠に有難うございます。安全にお使い頂くために、必ずご使用前にこの取扱説明書をお読み下さい。

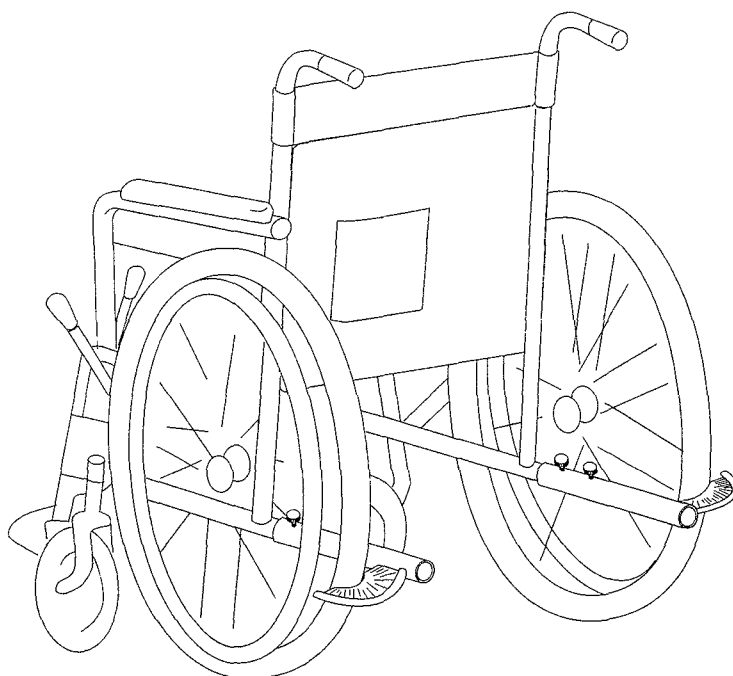

使用例

注 意

- 取付パイプは標準サイズ（パイプ外径φ19～21mm）になっています。


取付方法

車椅子の下端部のパイプに差込みます。


外れたり、回ったりしないようネジを
しっかりと締めてください。

パイプ（外径21mmまで取付可能）

パイプに
差込みネジを
締める

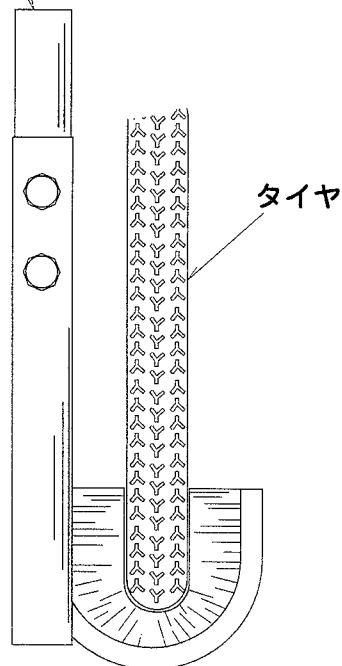


取付図

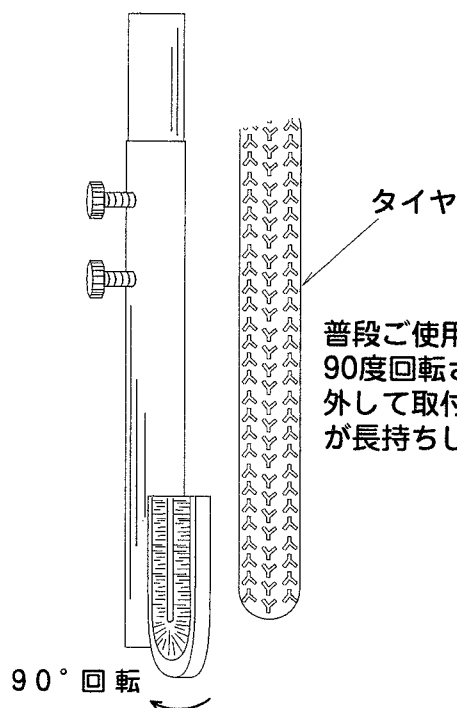

タイヤから外した時

普段ご使用なさらない時は
90度回転させてタイヤから
外して取付ますと、ブラシ
が長持ちします。

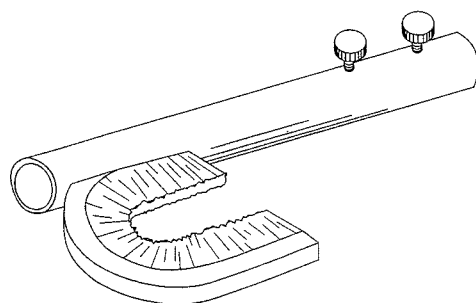

外観図

●ブラシの手入れ

ブラシは使用が続きますと、直毛性を失って
きます。このような場合、お湯（40℃）に浸
けますと多少復元し、まっすぐになることが
あります。

アズワン株式会社
カスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875（フリーダイヤル）

FAX : 0120-700-763（フリーダイヤル）

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。