

Instruction Manual

取扱説明書


電動診察台 上下背上げ式

DB-2

0-5515-02

この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

外 観 図

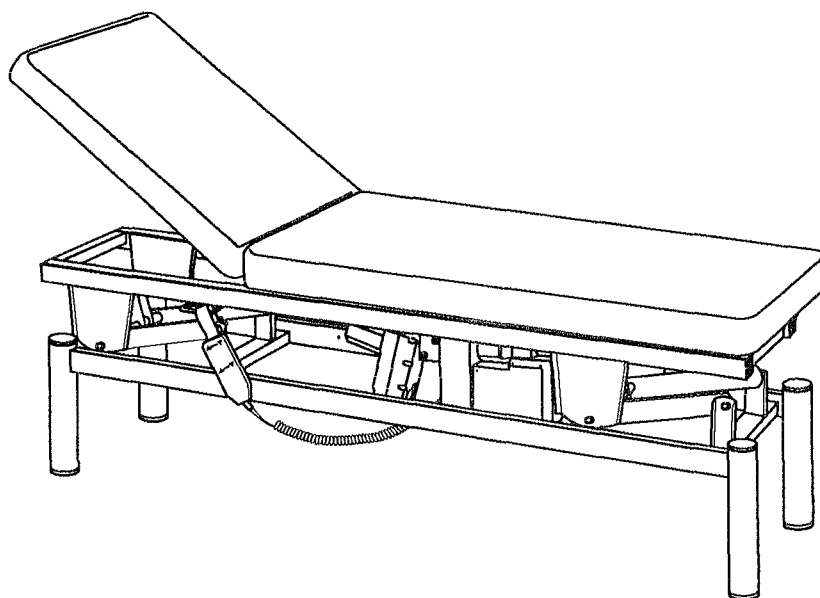


△ 注 意

- 診察台の下端の可動部に、手・足・首を絶対に入れないで下さい。ケガ・骨折・死亡の危険があります。
- マットレス部の下に（昇降する機構部）、手・足・頭を入れると危険です。手・足・頭を入れた状態で昇降させるとケガ・骨折・死亡の危険があります。
- 診察台以外の用途での使用はおやめ下さい。
- 電源は必ずAC100Vをご使用下さい。
- ベッドの上下移動と背上げの上下移動は、同時に操作しないで下さい。
- 診察台に二人以上乗せての診察はおやめ下さい。
- 背上げ部に直接人は乗らないで下さい。
- 診察台に火気を近づけないで下さい。
- この診察台は昇降する際、マットレス部が前後に約10cm移動します。設置時には診察台の周辺に若干の余裕を取って下さい。

操作方法

●リモコン操作方法

(診察台は手元スイッチで作動します)

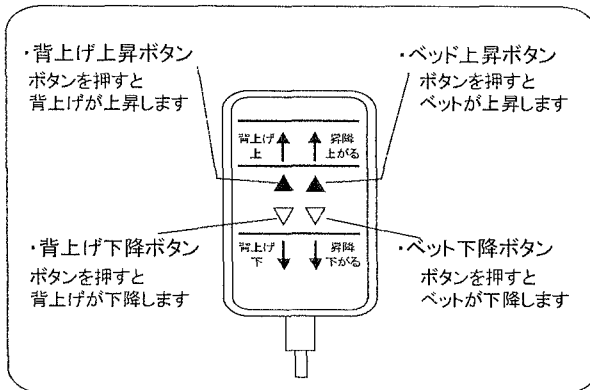

* 短時間の間に頻繁に操作した後などに、温度過昇防止のため、ロック保護機能によりアクチュエータが再起動できない場合があります。その場合、コンセントを抜いて3分以上待ってから操作し直して下さい。

仕様

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|-------------------|
| 本体寸法 | W1800×D620×H500～880(mm) | 昇降速度 | 60kgの荷重において31mm/秒 |
| マット部寸法 | W1100×D620×H75(mm) | 背上げ角度 | 0～75° |
| 背上げ部寸法 | W700×D620×H75(mm) | 操作方法 | ハンドスイッチ操作(昇降・背上げ) |
| 背上げ機構 | DCモーター作動/24V(生活防水タイプ) | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 昇降ストローク | 380mm | 消費電力 | 120W |
| | | 重量 | 53kg |

保証規定

- ・正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より1年間無償修理致します。
- ・次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ・ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理致します。

| | | | |
|--------|--------------|---|--|
| 品名 | 電動式診察台上下背上げ式 | | |
| 型式 | DB-2 | | |
| 保証期間 | お買上げ日より1年間 | | |
| お買上げ日 | 年 | 月 | |
| お名前 | | | |
| ご住所 | TEL. | | |
| 取り扱い店名 | 担当 | | |
| 住所 | TEL. | | |

■商品についてのお問い合わせは TEL: 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX: 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間: 午前9時～午後5時30分まで

カスタマー相談センター

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。