

取扱説明書

0-2444-01	清拭車 B I G-1
0-1294-01	オムツ交換車（レールガイド仕様）T S S-40型
0-4484-12	オムツ交換車（バスケット式）S J N-55B型
0-5447-01, 02	清拭オムツ交換車（アルミ製）A型、B型
0-5710-01	清拭オムツ交換車（アルミ製）C型
0-5709-01	清拭オムツ交換車（アルミ製）D型

1、使用用途

オムツ交換の際に使用する運搬車です。

2、特 徴

院内で手軽にオムツの交換や移動が出来、収納に便利な棚段や引出し等がついています。

スチーマー又は保温庫が付いていて、オムツの交換の時に蒸しタオルで清拭が出来ます。

使用済みのオムツやタオル等が簡単に収納出来るポリダスターやビニル帆布が一つまたは複数個付いています。

3、取扱上の注意

- ① 床面が凹凸状または段差がある場所での使用は、本体・キャスター等故障のもととなりますので、その様なところでは使用しないで下さい。
 - ② 付属品のポリダスター及びビニル帆布は専用品をご使用下さい。 専用品以外のポリダスターやビニル帆布は保持することが出来ません。 ビニル帆布の装着は取付け用パイプにボタンで確実に装着し、ポリダスターは2本の取付け用金具の間にしっかり固定して下さい。 ポリダスター取付け用金具が緩い場合は両側から押しすぼめて下さい。
 - ③ 引出し及び引出し式バスケットは、両側引抜き式になっておりますので、奥の物を取り出す際は逆側に引き出してご利用下さい。 物品が入ったまま引抜くと脱落する場合があります。 また、引出等を引出したまま搬送する事は大変危険ですのでおやめ下さい。
 - ④ 搬送用の際には必ずスチーマー及び保温庫のプラグを差したまま移動すると脱落の恐れがあります。
- ※ ⑤ スチーマー・保温庫の仕様及び取扱いについては各々の製品に付属の説明書をご参照下さい。

アズワン株式会社
カスタマー相談センター
TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)
FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)
受付時間 : 午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。