

☆ 取扱説明書 ☆

品名 ステンレス作業台 (引出なし)

《B - 900, B - 1200, B - 1500, B - 1800》

I. 使用用途と特徴及び取扱上の注意

1. 使用用途 院内での各種作業台として使用します。
2. 特徴 オールステンレス製ですので清潔感のある作業台として使用できます。また、サイズも900から1800mmと、各種を用意。
3. 取扱上の注意
 - ① 床面が凸凹状態のところでの使用はがたつきが生じ作業能率の低下となりますので、その様なところでは使用しないで下さい。
 - ② キャスターにはストッパーがついていますので、配置場所が決まり次第、ストッパーがONになる方に強く踏み込み固定して使用して下さい。
 - ③ ステンレス板の切断面に直接、手を触れないで下さい。
4. 組立方法
 - ① 購入時に、天板部分とH型脚部2組、脚部を繋ぐパイプに分け箱に入っています。
 - ② 天板部分を逆さまにし、裏側にH型脚部を差込みノブネジを強く締めて固定して下さい。H型脚部を2組固定した後、脚部を繋ぐパイプで2組の脚を繋ぎ、六角ナットでぐらつきのないように締めて下さい。その後、表に返し使用して下さい。

II. 材質及び規格

1. 材質 本体/ステンレスSUS304
キャスター/Φ75mm、対角ストッパー付
2. 寸法 B-900 / (幅)900×(奥行)600×(高さ)800mm
B-1200 / (幅)1200×(奥行)600×(高さ)800mm
B-1500 / (幅)1500×(奥行)600×(高さ)800mm
B-1800 / (幅)1800×(奥行)600×(高さ)800mm

アズワン株式会社

TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間 : 午前9時 ~ 午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。