


## 起楽椅子

0-3528-01

この度は、ご購入頂き誠に有難うございます。安全にお使い頂くために、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、説明書は大切に保管のうえ必要に応じお読みください。

### 全体図

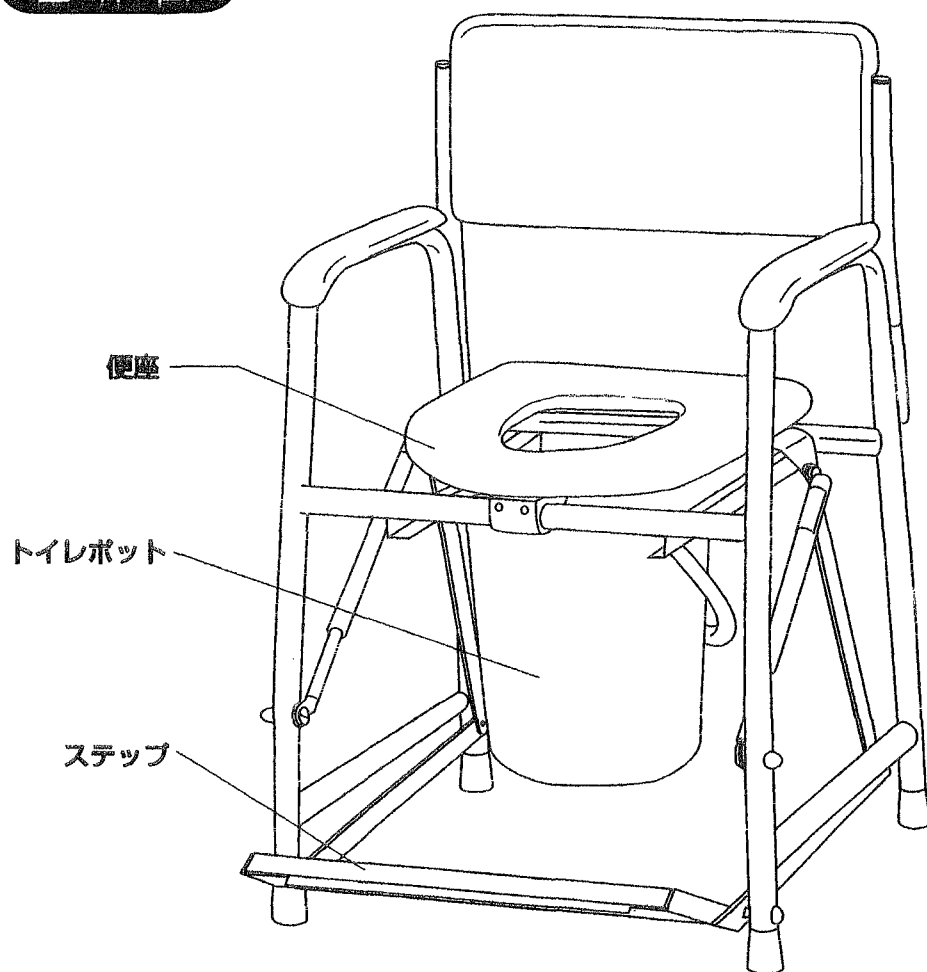

## 使用方法

- 1.座部が降りた状態で座ります。
- 2.立ち上がる時は、介護者がステップを踏み込みながら、患者さんが立ちやすいようにお手伝いしてください。
- 3.背もたれは差し込み式です。不要の場合は外してお使いください。

## △ 使用上の注意と警告

- 介護者なしでのご使用はお止めください。
- 患者さんが一人でステップを踏み込んで立ち上がるのは、転倒の恐れがありお止めください。
- 座部下に手を入れることは絶対にお止めください。指、手に大けがをし大変危険ですのでお止めください。

## 仕 様

外 径 寸 法	(幅) 500× (奥行) 660× (高さ) 825mm
材 質 / 本 体	ステンレス
材 質 / 便 座 部	ウレタンクッション
材 質 / ポ ン ベ 架 部	スチール

アズワン株式会社  
カスタマー相談センター  
TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)  
FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)  
受付時間 : 午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

お買上げ年月日	平成 年 月 日
購 入 先 店 名	
住 所	
お 電 話 番 号	

販売店さまへ 上に必ずご記入のうえお渡し下さい。