

取扱説明書

0-476-01 袖付器械卓子

1. 特徴

診察室、手術室、器具薬品運搬等広範囲で使える器械卓子です。

2. 取り扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用ください。
- ② エレベーター等の乗り降りにキャスターが隙間に落ちないように注意して下さい。
- ③ ステンレス板及びパイプの切断面には直接手を触れないで下さい。
- ④ 棚1枚に付耐荷重30KGですのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑤ 上段だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますとバランスを崩し転倒する可能性がありますので注意して下さい。
- ⑥ 上下棚はお盆状ですが、消毒液等を貯水することは出来ません。
- ⑦ 袖の棚のみに荷重がかかると転倒しますので注意して下さい。
- ⑧ 袖の出し入れ時体の一部、衣服等挟む恐れがありますので充分注意して下さい。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間 : 午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。