

取扱説明書

Instruction Manual

車椅子車輪カバー

お買い上げ誠にありがとうございます。
 本書をよくお読みの上正しくお使いください。
 お読みになった後は、いつでもとりだせるところに大切に保管ください。


前輪用
 後輪用

ご使用上の注意

- ・本商品は屋内用です。高温多湿なところでのご使用はおやめください。
- ・前輪はキャスターとキャスターフォーク(キャスターカバー)の隙間が1cm程度ある車椅子で
 ご使用ください。カバー取付後にキャスターフォークなどに接触していないか確認してくだ
 さい。キャスター回転時にカバーが接触しますと、キャスターが回転しなかったりカバーの
 縫製がほつれたりして危険です。
- ・汚れた場合は手洗い後、風通しのよいところで陰干しをしてください。

取付方法

<前輪用>

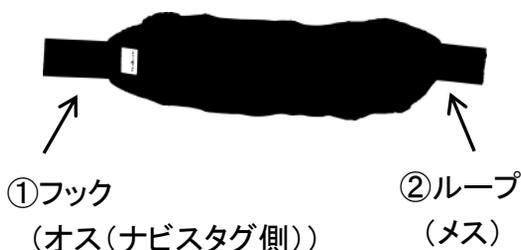

回転方向



図のようにキャスターの進行方向に向かって、
 ①の上に②が覆うようにして固定してください。

<後輪用>



(1)はじめに車椅子ブ
 レーキで本商品を仮り
 抑えしてください。



(2)次に床面と接地してい
 る下側を通してから上へ
 被せてください。
 ※取付が完了しましたら
 車椅子ブレーキを解除し
 てください。

仕様

型番	品番	適応サイズ
前輪用	7-5379-01	6~8インチ
後輪用	7-5379-02	22~24インチ

- ・入数:2個入り
- ・材質:本体/クロロプレンゴム、
 滑り止め部/PVCコーティング
- ・面ファスナー留め
- ・洗濯機不可、乾燥機不可

アズワン株式会社

■商品に関するお問い合わせ
 カスタマー相談センター
 TEL 0120-711-763
 FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

made in china 2018年10月初版