

# 取扱説明書

Instruction Manual

## キッズターニケット ベビーターニケット(乳児用)


500185 0-8081-01

560160 0-8082-01

500186 0-8081-02

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 外観図

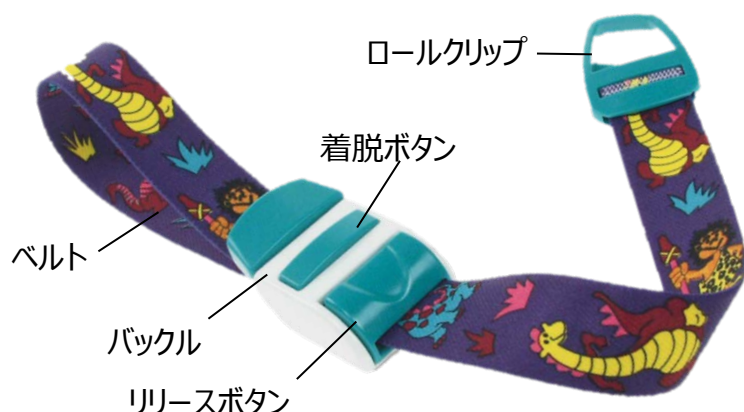

#### 【特徴】

- 片手で簡単に操作ができる駆血帯です。
- 可愛いデザインで、駆血帯時のお子様への心理的不安を和らげます。
- ラテックスフリーです。

※ ベビーターニケットの外観は異なりますが、ボタンの位置と機能はキッズターニケットと同様です。


### 仕様

品番	0-8081-01	0-8081-02	0-8082-01
型番	500185 ディーノ	500186 サークス	560160 乳児用
材質	バンド／ポリエステル・Lycra®(ストレッチ素材)、 バックル／PC、ボタン・ロールクリップ／POM		
ベルトサイズ(幅×長×厚)	24×460×1.6 (mm)		12×350×2.5 (mm)
原産国	ドイツ		


**⚠ 注意** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 本製品は医療従事者が駆血などを行うための駆血帯（ターニケット）です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 本説明書をよく読んでから、ご使用ください。
- 必要以上にベルトを引っ張り、過度に締めすぎることのないようにご注意ください。
- ベルトを締める際、皮膚をバックルに挟んでしまう場合もありますので、締める際には術者が患者様の皮膚を挟まないように配慮しながら、ご使用ください。（特に高齢者の皮膚にご配慮ください。）
- バックルやベルトに破損を見つけた時には、使用を中止してください。


## 使用方法

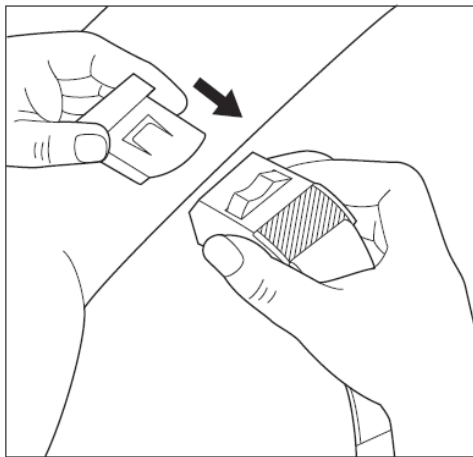


① ベルトを腕に回し、バックルを矢印の方向に差し込んでください。

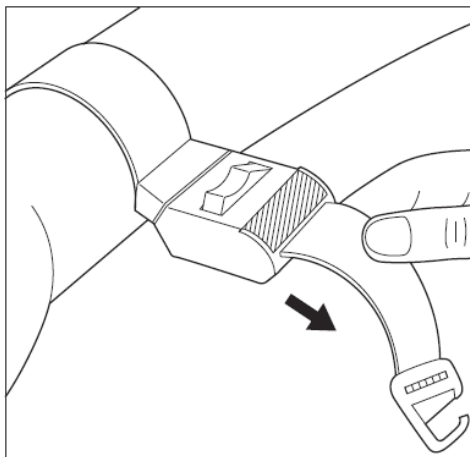


② 出ているベルトを矢印の方向に引っ張り、患者様の腕の太さに合わせて調整してください。

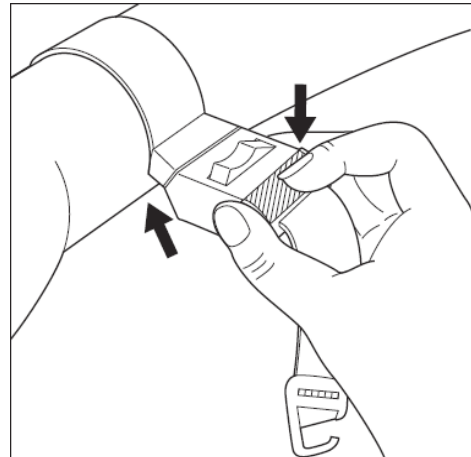

③ リリースボタンを指で押すと、ベルトを緩めることができます。

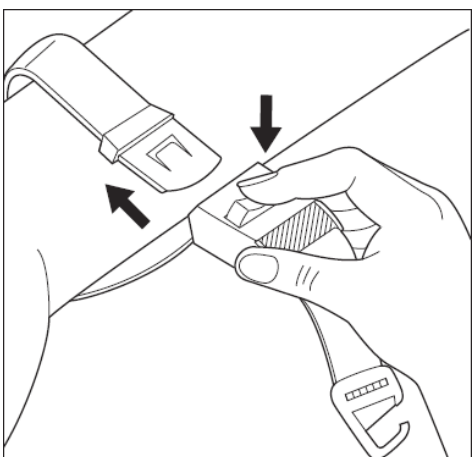

④ 着脱ボタンを指で押し込むと、バックルが外れます。

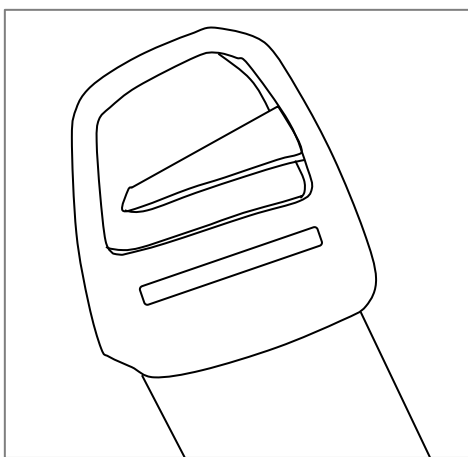

⑤ ロールクリップは、収納する際や、保管時などに引っかけるために使用します。

## お手入れ方法

- 市販の洗濯用中性洗剤で、40℃程度の温水で手洗いしてください。
- 洗剤で洗った後は、ぬるま湯で少なくとも2回はターニケットを濯ぎ洗いしてください。
- 香りのある洗剤はお避けください。また、塩素や塩分は色落ちや生地を傷める原因となりますので使用しないでください。漂白剤も使用できません。
- 洗浄後は水気をふき取ってから、陰干しでよく乾かしてください。直射日光はお避けください。浸け置き洗いや乾燥機、アイロン、ドライクリーニングはできません。
- ターニケットが血液や分泌液などの体液に触れた場合、地域のルールに従ってすぐに廃棄してください。体液に触れた場合は再利用できません。
- 滅菌は、121℃でのオートクレーブ滅菌が可能です。洗剤でのお手入れをお勧め致します。
- バックルと先端部分はアルコール消毒(清拭)も可能です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

 **アズワン株式会社**

第3版 2018年10月 作成