

# 取扱説明書

## 超薄型シャウカステン(LED 光源)LH-1 超薄型シャウカステン(LED 光源)LH-2

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

## 安全上のご注意



この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

### 各警告表示の定義

 <b>危険</b>	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 <b>注意</b>	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 <b>警告</b>	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。	 <b>お願い</b>	安全を確保するために注意が必要な事項。



いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

## 安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		指を挟みこむ危険がある場合の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示





## <設置上の安全に関する注意>




製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周囲温度が 10～40℃以内、周囲湿度が 30～85%以内のところ。</li> <li>・結露しないところ。</li> <li>・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用ください。本体が変形する恐れがあります。</li> <li>・垂直で強度のある壁面に取付けてください。ねじ釘がすぐに抜けてしまうような壁に取付けると、落下する恐れがあります。</li> <li>・直射日光のあたらないところに設置してください。</li> </ul>

※この製品は、屋外で使用することはできません。

## <使用上の安全に関する注意>

 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・濡れた手でのスイッチの操作、電源コードの抜き差しやコネクタ部の接続はおこなわないでください。感電の危険性があります。
	・電源プラグの差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。接触不良により、火災の原因となる場合があります。


⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品の観察面等は樹脂製品ですので有機溶剤類が接触すると、樹脂部分の表面が溶けたり変形することがありますから、これらの薬品を接触させないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体や他の部分に、強い衝撃を与えたり無理な力を加えると、破損する恐れがありますので、丁寧に扱ってください。</li> <li>電源コードは足を引っかけないようなところに取り回してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。</li> </ul>

## ＜部品明細＞

開梱後は内容を確認してください。


部品名	数
本体	1
壁掛け金具（壁側）	2
AC アダプタ	1

## ＜外観及び各部名称＞

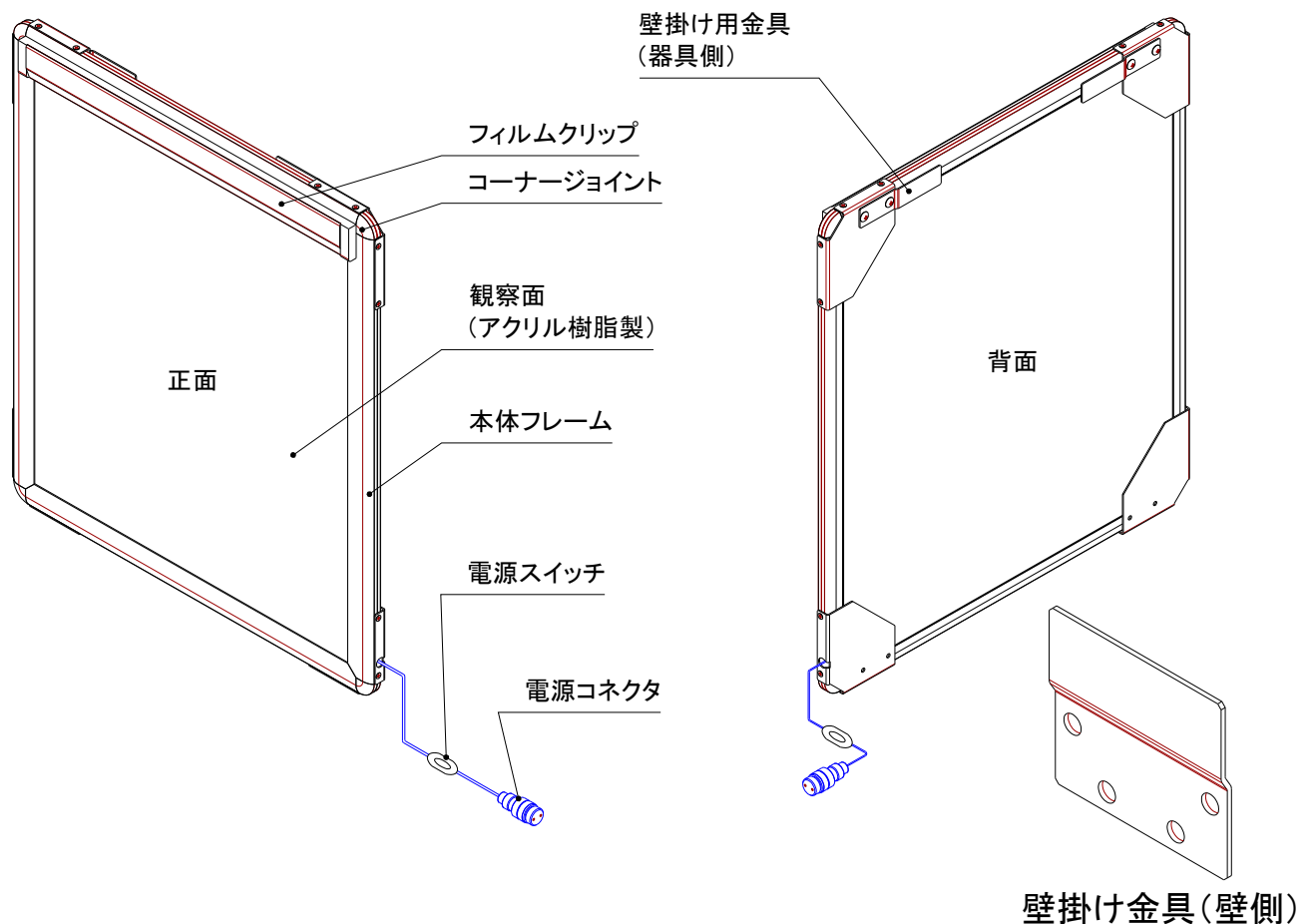


## <壁掛け金具 固定ネジ位置参考図>

### LH-1タイプ

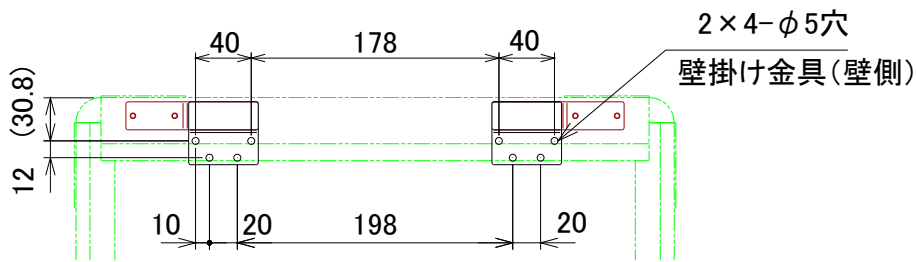

### LH-2タイプ

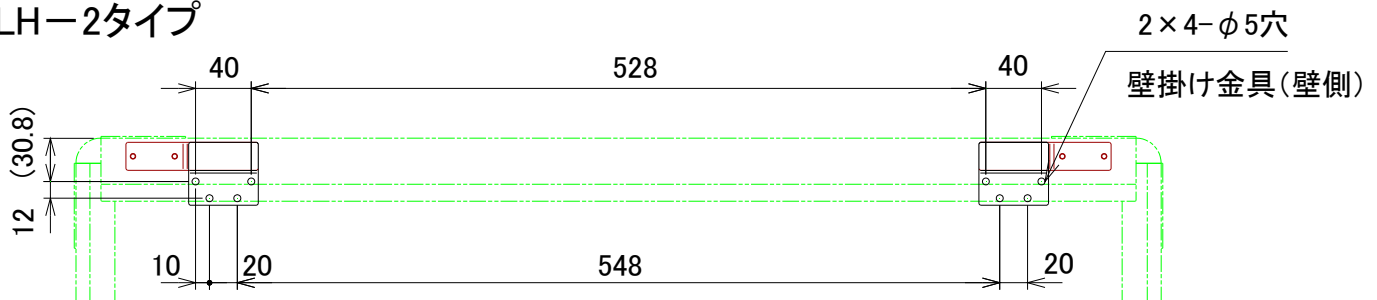

## <組立・取付け方法>

①壁掛け金具（壁側）を壁に取り付けてください。

上図の壁掛け金具間隔及び取付け穴を参考にしてください。

※強度のある壁に取り付けてください。ネジ釘が抵抗無く簡単にねじ込めるような壁ですと、重みによりネジ釘が抜けて落下する恐れがあります。

②本体の背面に固定されている壁掛け用金具（器具側）を①で壁に固定した壁掛け金具（壁側）に引っ掛ける様にして本体を壁に取り付けてください。

## ご注意！

※垂直で強度のある壁面に取り付けてください。ねじ釘がすぐに抜けてしまうような壁に取り付けると、落下する恐れがあります。

※壁の強度が不安な場合は市販のボードアンカーなどを使用して補強してください。


## <使用方法>

1. 電源が OFF で、かつ、AC アダプタの電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。
2. シャウカステン本体側の電源コネクタと AC アダプタ側の電源コネクタを接続してください。
3. 電源プラグを AC100V のコンセントに差し込んでください。
4. 電源スイッチを ON にしてください。観察面が発光します。

## <お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 注意	
	・ クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。観察面が溶けたり、観察面や本体に傷がつく場合があります。

## <お願い>

※時折、取付け強度を確認してください。本体や壁掛け金具がぐらつく場合は、直ちに使用を中止し、固定ネジが十分に締まっているか確認してください。

## <仕様>

	LH-1	LH-2
寸法（mm）	W430×D16.2（29.1）×H500	W780×D16.2（29.1）×H500
質量	約 3.5kg	約 6.0kg
本体フレーム	アルミ型材（アルマイト処理）	
観察面	アクリル樹脂	
電源	単相 AC100V 50/60Hz	
付属品	壁掛け金具（壁用）×2 個 AC アダプタ×1 個	

※壁面取付け用ビス（ネジ釘など）は付属していません。

壁面材に合ったネジ釘をご用意願います。

※壁面の強度が弱い場合は、市販の「ボードアンカー」などを使用してください。

原産国：日本  
2 版 2018 年 10 月作成

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に製造上の不備による欠陥又は正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品 名	超薄型シャウカステン（LED 光源）		
型 式	LH-1、LH-2		
保 証 期 間	お買い上げ日より 1 年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL :		
販 売 店 名	担当者印		
住 所	TEL :		

### <保証規定>

- (1) 正常な使用状態において故障が生じた場合、お買い上げ日より 1 年間無償修理致します。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、および保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。