


# 取扱説明書

Instruction Manual

## 酸素ボンベ車

CFM 0-3333-11

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

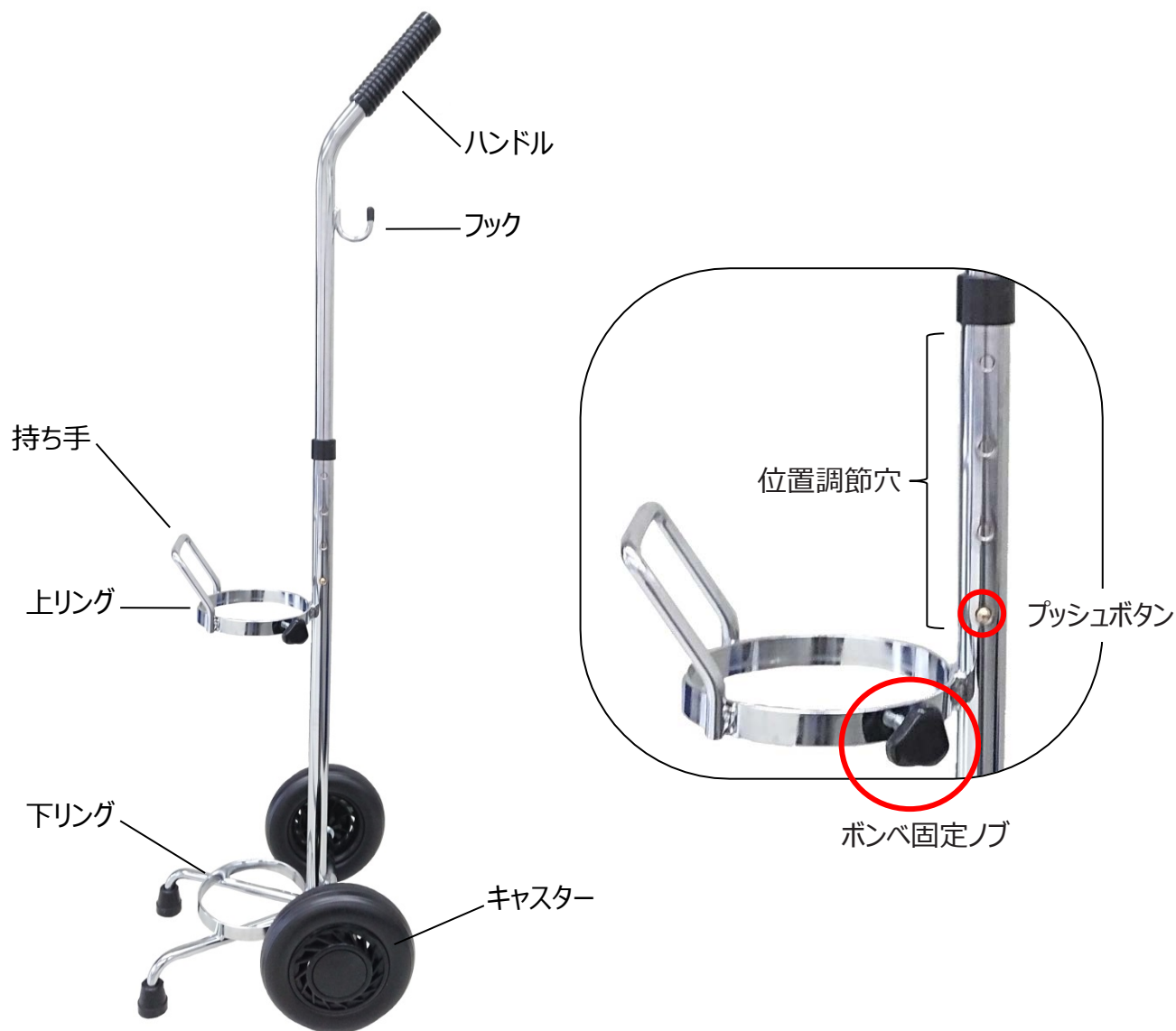

### ⚠ 安全上の注意

- 本商品は、酸素ボンベ専用の運搬車です。転倒・落下等により怪我をする恐れがありますので、酸素ボンベを運搬する以外の用途では使用しないでください。
- ボンベを本商品に載せたまま長期保管しないでください。転倒により、ボンベが破損する恐れがあります。
- 使用時はノブがしっかり締まっていること、プッシュボタンが確実にはまっていること等、問題や異常がないかご確認の上でご使用ください。
- ボンベは慎重に運搬してください。特に、段差を乗り越える際や、傾斜地を通過する際はバランスを崩さないようご注意ください。

## ⚠ 使用上の注意

- ノブがしっかり締まること、プッシュボタンが確実にハマること、各部に緩みやがたつきがないこと等、商品に異常や問題点がないかを定期的に（月に1回以上）点検を行ってください。
- キャスターに注油をしないでください。床や服を汚す恐れがあります。
- キャスターの動きが悪くなった場合は、キャスターに付着したゴミを取り除いてください。

## 組立方法



- ① 下部パイプに、上パイプを差し込みます。  
上パイプ下部の側面にあるプッシュボタンを、親指と人差し指で同時に押し込みながら、下パイプに挿し込みます。



- ② プッシュボタンを、任意の位置調節穴から出します。プッシュボタンを出す穴を変えることで、ハンドル部（上パイプ）の長さを調節することが可能です。



ポンペ固定ノブ

- ③ 上リングの側面についているポンペ固定ノブを締めることで、酸素ポンペを固定することができます。ノブは時計回りで締まり、反時計回りで緩みます。Φ110mmまでの500ℓ 酸素ポンペが使用可能です。

# 仕様

材質	本体／スチール、キャスター／EVA
幅×奥行×高さ（mm）	300×300×970～1100（※高さ4段階調節可能）
キャスター径	φ150mm
ポンペ固定リング内寸法	φ115mm
使用可能ポンペ	500ℓ 酸素ポンペ（外径 φ110mmまで）
重量	2.2kg

Made in Taiwan

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> <li>弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。</li> <li>次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・誤使用、不当な修理・改造による故障。</li> <li>・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。</li> <li>・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。</li> <li>・接続している他の機器が原因による故障。</li> <li>・車両・船舶等での使用による故障。</li> <li>・消耗部品、付属部品の交換。</li> <li>・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。</li> </ul> </li> <li>ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。</li> <li>本保証書は日本国内においてのみ有効です。</li> </ol>	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。</p> <table> <tr> <td>品 名</td><td>酸素ポンペ車 CFM</td></tr> <tr> <td>品 番</td><td>0-3333-11</td></tr> <tr> <td>保 証 期 間</td><td>お買い上げ日より1年間</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>お 名 前</td><td>様</td></tr> <tr> <td>ご 住 所</td><td>TEL.</td></tr> <tr> <td>取り扱い店名</td><td>担当者印</td></tr> <tr> <td>住 所</td><td>TEL.</td></tr> </table>	品 名	酸素ポンペ車 CFM	品 番	0-3333-11	保 証 期 間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お 名 前	様	ご 住 所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住 所	TEL.
品 名	酸素ポンペ車 CFM																
品 番	0-3333-11																
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お 名 前	様																
ご 住 所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住 所	TEL.																

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

**カスタマー相談センター**

TEL 0120-711-875  
FAX 0120-700-763  
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

**修理窓口**

TEL 0120-788-535  
FAX 0120-788-763  
問合せ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません