

取扱説明書

Instruction Manual


ベッドサイドテーブル【移動テーブル】

navis

8-2233-01 LS-MT02

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

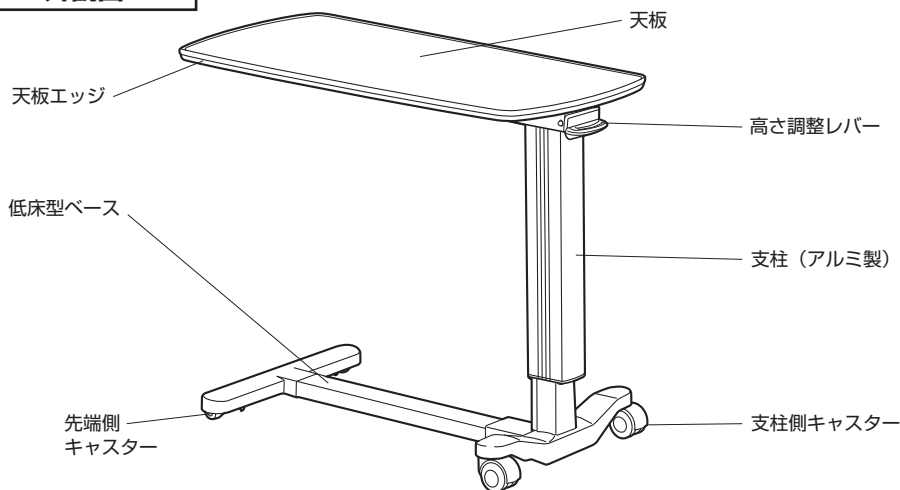

<セット内容>

- | | | | |
|---------------------|-------|------------------|-------|
| ● 天板 | × 1 枚 | ● 支柱固定用ワッシャー (大) | × 3 枚 |
| ● 支柱 (天板固定用ステー付) | × 1 式 | ● 天板固定用木ねじ | × 6 本 |
| ● 低床型ベース (キャスター取付済) | × 1 個 | ● 天板固定用ワッシャー (小) | × 6 枚 |
| ● 支柱固定用ボルト | × 3 本 | | |

※組立に必要な工具：六角レンチ (8mm)、+ドライバー

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- ご使用前に、天板裏面のステー取り付け部分・低床型ベースの支柱取り付け部分のネジやボルトが最後までしっかりと締まっていることを定期的に確認してください。
万が一緩みがあるままご使用になれますと、転倒によりケガをすることがありますので、ご注意ください。
- 平坦な床でご使用ください。
- ご使用になる際は、不用意に動かないよう配慮してご使用ください。
- 高さ調節レバーに物をぶつけたりすると破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- エレベーターに載せる際には、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 天板は樹脂製ですので、強い衝撃を与えると、割れてケガをする可能性があります。

- 天板の上に重量物を載せたり、寄りかかったりしないでください。転倒や天板破損の原因になります。
- 天板や支柱などに薬品などが付着したらすぐに拭き取ってください。長時間放置すると変色する恐れがありますので、ご注意ください。
- ご使用前に、各部にゆるみやガタつきが無いか、違和感がないかご確認の上ご使用ください。万が一解決しない場合にはご使用を中止してください。


本取扱説明書で不明な点は、当社のカスタマー相談センター（裏表紙に記載）まで御連絡ください。

特長

- 低床型ベッドに対応した高さの低いベースを採用しています。
- 高さ調整レバーにより、625～915mmの任意の高さに設定出来ます。
- キャスターが付いていますので、移動も容易です。
- 樹脂天板を採用していますので、天板の上も清潔に保てます。
- ベースは角の少ない、清掃しやすい形状にしています。
- 太めの支柱により、安定感を高めています。

組立方法

- 1** 梱包を開け、天板裏側にして置いてください。その際、梱包のダンボールなどを敷いて作業すれば、天板などを傷つけずに作業出来ます。
- 2** 天板の支柱取り付け側（裏面）にはステー取り付け用のネジ穴が開いています。高さ調整レバー側を下にして、支柱の天板固定用ステー（金具）を天板裏面のネジ穴に合わせて天板に6ヶ所ワッシャー（小）を挟んでネジ止め（+ドライバー使用）してください。最初に仮止めし、ステーが均等に固定できるよう、対角にしっかりと6本ともネジ止めしてください。
- 3** **2**で組立てた天板と支柱のセットを天板長面側を横にし、**1**で敷いたダンボールの上に倒します。
- 4** **2**の支柱下側を低床型ベース上側の支柱取り付け位置（くぼみ有り）に差し込んだ後、低床型ベース裏面よりワッシャー（大）を挟んで六角レンチ（8mm）でボルト止めしてください。3ヶ所のボルトをしっかりと締めてください。

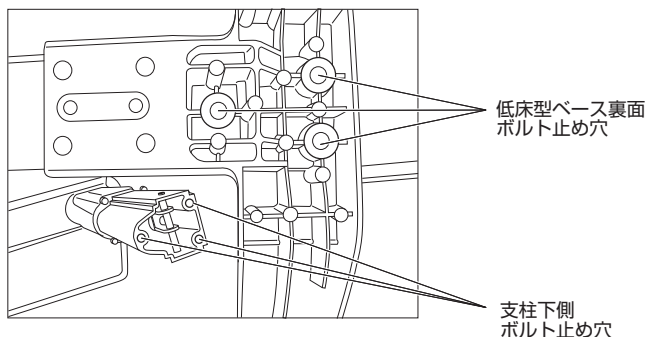

- 5** 天板と支柱を立てたら完成です。各部位にゆるみが無いかご確認の上、ご使用ください。

使用方法

- 1 天板の端を掴みながら、支柱の高さ調節レバーを上握ってください。ガスシリンダーにより、天板が上に上がっていきますので、任意の高さでレバーを離してください。
- 2 レバーを握っている間は調節ができます。天板を下げる際には、**1**と同じ手順で高さ調節レバーを握りながら天板を下に押してください。
設定したい高さになりましたら、レバーを離してください。天板が固定されます。
(※支柱内にガスシリンダーを使用しているため、従来の商品と比べると少し調節が硬めになっていますので、体重を掛けながら、天板を下げてください)
- 3 移動する際には、安全のため、天板に物を載せない状態で移動してください。

お手入れ方法

- 中性洗剤を水で薄めて絞り、雑巾やスポンジに付け、汚れを拭き取ってください。その後、水拭きした後に空拭きしてください。
- 漂白剤やクレンザーは素材を傷めるので、ご使用しないでください。
- 次亜塩素酸ナトリウムなどで清拭した後にそのまま放置すると、材質が侵食することがあります(特に支柱やベース)ので、ご注意ください。


仕様

品番	8-2233-01
サイズ	W800×D400×H625～915mm(任意)
高さ調節方式	ガスシリンダー調節式
ベース部サイズ	W570×D480mm
材質	支柱／アルミニウム 天板／表面：樹脂製、構造／合板 高さ調整レバー／ABS(強化プラスチック) ベース／アルミダイキャスト(粉体塗装) キャスター／支柱側：ナイロン製 φ50mm (いずれも)双輪・自在・ストッパーなし) ベース先端側： // φ40mm(//)
本体重量	18.5kg
耐荷重	天板／約10kg

Made in CHINA

(本仕様は性能向上のため、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。)

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

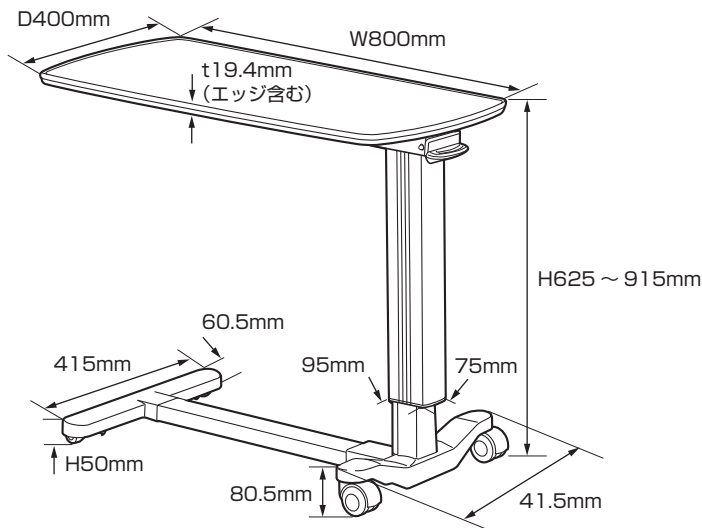

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	ベッドサイドテーブル【移動テーブル】		
型 式	LS-MT02		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 名 前	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

 0120-711-875 (フリーダイヤル)

 0120-700-763 (フリーダイヤル)

 <http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社