

取扱説明書

ユーロスタイルロフトスタンドクラッチ


navis*

8-7563-01 86051 茶

8-7563-02 86051 黒

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

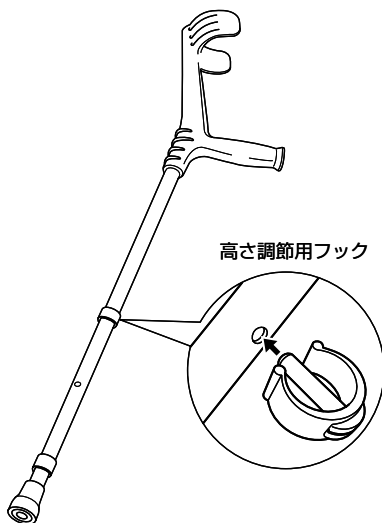

⚠ 注意

- 高さ調節用フックが取り付けられていない状態で使用することはおやめください。
急に長さが短くなるなど大変危険です。
- 特に横方向からの大きな力を加えないでください。
- ゆがみ、変形、ガタなどを起こした場合には直ちに使用を中止してください。
- いったん変形したものを直して使用することはおやめください。
著しく強度を低下していることが考えられ、思わぬケガをする恐れがあります。
- 滑りやすい所、濡れた所、雪道、接地の不安定な所では、使用しないでください。
小石や段差にもご注意ください。
- 本来の用途目的以外の使用は避けてください。

長さ調節の方法

- 1** 高さ調節用フックを取り外し全体の長さを好みの長さに調節します。
- 2** 再び高さ調節用フックを取り付け、穴から出たことを確認してからご使用ください。

仕様

品番	8-7563-01	8-7563-02
型番	86051茶	86051黒
全長	約900～1150mm	
材質	シャフト：アルミニウム、カフ：PP（ポリプロピレン）	
高さ調節	10段階（25mmピッチ）	
重量	約480g	
シャフト径	φ19mm	

交換用オプション

品番	8-7563-11	8-7563-12
型番	先端ゴム 黒	先端ゴム 茶
材質	天然ゴム	
備考	穴径φ18mm×47mm	

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	ユーロスタイルロフトストランドクラッチ		
型 式	86051茶・86051黒		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 名 前	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875（フリーダイヤル）



0120-700-763（フリーダイヤル）



アズワン株式会社