

取扱説明書

Instruction Manual

移乗用ターンテーブル

HA-4770 7-4363-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。



仕様	
外径×高さ	Φ 404mm × 20mm
材質	ABS樹脂
重量	約1kg
耐荷重	100kg

Made in Taiwan

⚠ 注意事項

- 本商品は、座位や立位から体の方向転換する際に使用する補助具です。用途外の使用はしないでください。
- 分解や改造はおやめください。
- 必ず介助者が付き添ってご使用ください。
- 平坦で濡れていない面に設置してください。毎回ターンテーブルが滑らないかをご確認の上ご使用ください。
- 座位で使用する際は、臀部をターンテーブルの中心に載せ、回転させてください。
- 立位で使用する際は、両脚をターンテーブルの上にはみ出さないように置き、回転させてください。
- 安全のため、ターンテーブルはゆっくりと回転してください。
- ターンテーブルの回転部に指を入れないでください。
- 商品を乱暴に扱わないようご注意ください。落下すると、変形や破損する恐れがあります。

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第1版 2019年 1月 作成