


取扱説明書

アルミ製松葉杖

CODE/0-9843-01~05 TYPE/86005, 86004, 86003, 86002, 86001

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの説明書をお読みください。

外観図

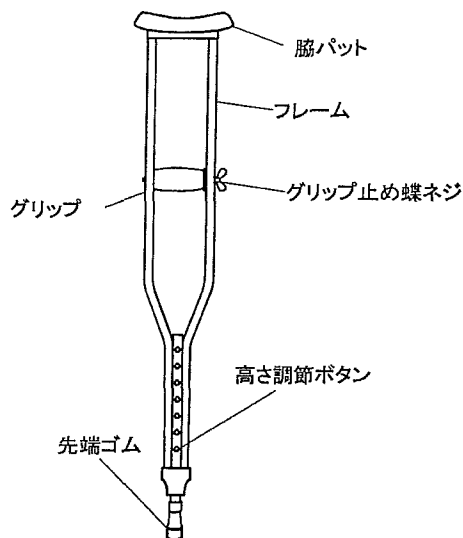

△ご注意

- 本製品の使用時は、周囲の状況に十分ご注意ください。
周囲への注意を怠ると思わぬ段差に引っ掛けて転倒し、大怪我をする恐れがあります。
- フレームが変形した場合は、絶対に使用しないで下さい。フレームが変形した場合、無理に元へもどして使用されますと強度が低下しますので、使用はお避けください。突然の破断により転倒し、大怪我をする恐れがあります。
- 定期的に(少なくとも1ヶ月に一度)各部に割れや破損がないことを点検して下さい。
- 本製品をいすがわりとして使用しないで下さい。
- 松葉杖は歩行補助として使用されるものです。それ以外の目的では使用しないで下さい。
- 専門の医師や指導員の指示に従って正しくご使用下さい。

△使用前に

- 各部のネジがしっかり締まっていることを確認して下さい。
 - <調節方法>に従って、適切な長さに調節して下さい。
 - 先端ゴムに摩耗や損傷が無いことを確認して下さい。
摩耗や損傷があるまま使用されますと、転倒の原因となる恐れがあります。
- <先端ゴム交換方法>
先端ゴムをねじりながら引っ張ると、取り外せます。交換用先端ゴムを取り付ける際も、ねじりながら、確実に奥まで差し込んで下さい。

調節方法


※専門の医師や指導員の指示に従って、適切な高さに調節して下さい。

<全長調節方法>

1. 左右の高さ調節ボタンを押しながら先端を引っ張り、高さを調節します。
2. 直立した状態で、脇パットの高さが脇の下3~5cmぐらいが適切な高さです。

<グリップ位置調節方法>

1. グリップ止め蝶ネジを反時計方向に回して、取り外します。
2. グリップ内部の固定軸を抜き取ります。
3. グリップの高さを調節します。
* グリップを握った際に肘がやや曲がる程度が適切です。
4. 固定軸を差し込み、グリップ止め蝶ネジを取り付けて、確実に固定します。
※本体の穴の形に合わせて、固定軸を奥まで確実に差し込んで下さい。(右図参照)
※グリップ止め蝶ネジを固定軸に対して真直ぐに取り付け、ねじ込んだ後ガタツキが無いことを確認してから使用して下さい。

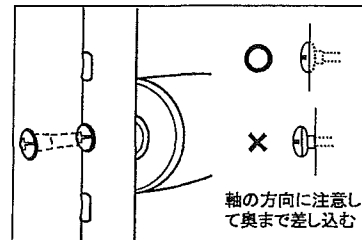

仕様

品番	0-9843-01	0-9843-02	0-9843-03	0-9843-04	0-9843-05
型番	86005	86004	86003	86002	86001
本体全長(mm)	600~805	790~940	940~1140	1140~1330	1330~1530
適応身長(cm)	109~123	123~136	136~158	158~178	178~198
材質	本体:アルミニウム 脇パット、グリップ:発泡ウレタン				
全長調整幅	25mmピッチ				
脇下調整幅	40mmピッチ				
交換用部品	先端ゴム:CODE 0-6617-06 / 脇パット:CODE 0-9843-11 / グリップ:CODE 0-9843-12				

保証規定

- ・正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より6ヶ月間無償修理致します。
- ・次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送等による落下による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、及び保証書の提示がない場合。
- ・ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理致します。

品名	アルミ製松葉杖		
型式	86001~86005		
保証期間	お買上げ日より6ヶ月		
お買上げ日	年	月	
お名前			
ご住所	TEL.		
取り扱い店名	担当		
住所	TEL.		

●商品に関するお問い合わせは、弊社「カスタマー相談センター」のフリーダイヤルにお電話ください。

カスタマー相談センター
0120-711-875
0120-700-763

承り時間
9:00~12:00・13:00~17:30
(土・日・祝祭日及び当社休業日は除く)

アズワン株式会社

初版2006年4月作成