

## 取扱説明書

Instruction Manual


## 松葉杖 (0-9843-23 ~ 25)

NS801S, NS801M, NS801L

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用頂くために「取扱説明書」をお読みになって正しくお使い下さい。  
「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れる場所に大切に保管して下さい。また本製品を譲渡、あるいは貸与されるときには新しく使用される方が安全で正しい使用方法を知るために本書を製品本体の目立つ場所に添付して下さい。

## 製品概要

## ■製品全体図

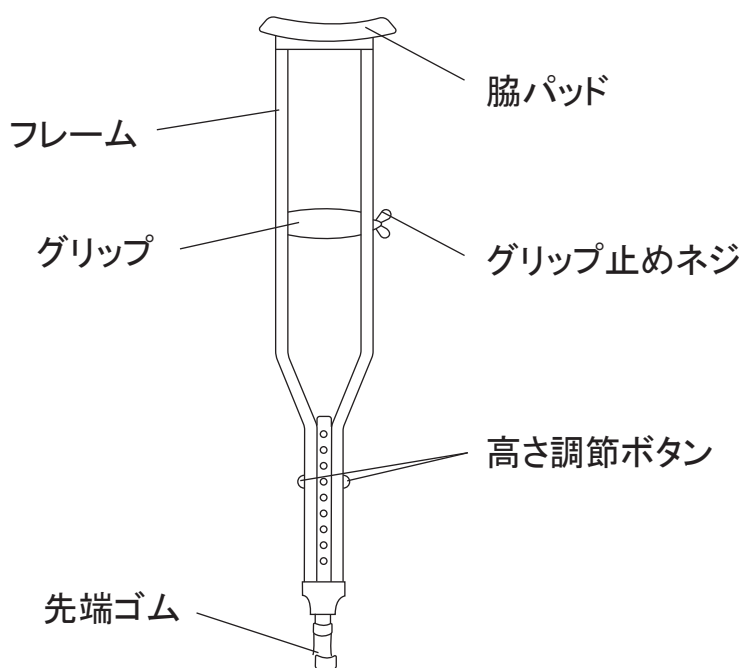





## 〈先端ゴム交換について〉

先端ゴムをねじりながら引っ張ると、取り外せます。  
取り付ける際も、ねじりながら確実に奥まで差し込んで下さい。

## 安全上のご注意

この取扱い説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願いいたします。

### 警告表示とその意味

 危険	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。
 警告	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される場合。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項

### 警告

- 本製品は必ず専門の医師や指導員の指示に従って正しくご使用下さい。
- ご使用の前に各部のネジを点検し、異常がないことを確認して下さい。
- 脇パッド、グリップ、先端ゴムは使用状況あるいは時間経過と共に磨耗、劣化します。ご使用の前に機能が保持されていることを確認して下さい。磨耗、劣化した状態で使用されますと転倒の原因となる恐れがあります。
- 定期的に（少なくとも1ヶ月に一度）は各部に割れや破損がないことを点検して下さい。
- フレームが変形した場合、さびやひび割れが見られた場合は絶対に使用しないで下さい。突然破断するなど、大怪我する恐れがあります。

### 注意

- 松葉杖は歩行補助として使用されるものです。椅子代わり、護身用など用途以外の目的では使用しないで下さい。
- 使用時は周囲の状況に十分ご注意下さい。（濡れた路面や段差のあるところ等）周囲への注意を怠ると、思わぬ事故につながり怪我をする恐れがあります。
- 落としたり、物にぶつかったりと乱暴に扱わないで下さい。変形や破損の原因となります。
- 長さを調節する際は、本説明書の「調節方法」に従って下さい。


## 調節方法

※専門の医師や指導員に従って適切な長さに調節して下さい。

### ■全長調節方法

- (1) 高さ調節ボタンを押しながら先端を引っ張り、高さを調節します。
- (2) 直立した状態で脇パッドの高さが脇の下3～5cmが適切です。

### ■グリップ位置調節方法

- (1) グリップ止めネジを反時計方向に回し、取り外します。
- (2) グリップ内部の中芯（長ネジ）を抜き取り、グリップを移動させます。  
※グリップを握った際に肘がやや曲がる程度が適切です。
- (3) 中芯（長ネジ）を挿入します。中芯の穴は長丸形状（）となっていますので、穴の形に合わせて中芯を最後まで押し込み回らない様にして下さい。
- (4) ワッシャーを通した後に、グリップ止めネジを取り付け、しっかりと固定して下さい。  
※がたつきが無いことを確認してから使用して下さい。

## 製品仕様

品番	0-9843-23	0-9843-24	0-9843-25
型番	NS801S	NS801M	NS801L
全長	940～1140mm	1140～1340mm	1340～1540mm
適応身長	137～157cm	157～178cm	178～198cm
脇あて～握り部	210～352mm	405～552mm	455～602mm
重量	約750g/組	約800g/組	約900g/組
材質	フレーム/アルミニウム、 パッド・グリップ/発泡合成ゴム		
高さ調節	高さ/約25mm間隔、脇下約38mm間隔		
シャフト先端径	φ22mm		
耐荷重	100kg/本		
入り数	2本/1組		

※改良のため仕様や外観を予告なく変更する場合があります。

※適応身長はあくまでも参考値としてお考え下さい。

### ■オプション

- 交換用脇パッド（1個） 0-9843-31
- 交換用グリップ（1式） 0-9843-32  
セット内容：グリップ、中芯、止めネジ、ワッシャー
- 交換用先端ゴム（1個） 0-6617-33

## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	松葉杖		
型番	NS801S, NS801M, NS801L		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL：		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL：		

**アズワン株式会社**

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**アズワン株式会社**

#### ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2019年1月 第1版  
Made in China