

取扱説明書

Instruction Manual


4点杖（軽量アルミニウム製）

navis*

8-1219-01 PW-101-AL-SI
8-1219-02 PW-101-AL-BK
8-1219-03 PW-101-AL-BR

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
 ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
 また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

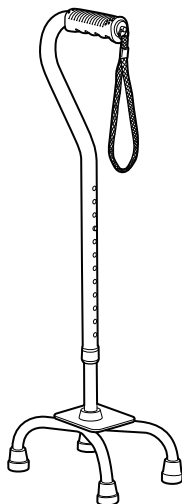

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 本製品は平坦な場所での歩行補助・歩行訓練を目的に設計されています。
登山・護身用には使用しないでください。
- お客様による修理・分解・改造は絶対にしないでください。
- 用途以外の目的で使用したり、誤った使い方をすると破損する恐れがあります。
- すその長い衣服で歩行訓練をしないでください。衣服を巻き込んで転倒する恐れがあります。
- 医師や理学療法士、販売店の指導に基づいてご使用ください。
- 身長に合った適切な長さに調節してからお使いください。
- 長さが身長に合わない場合は、使用を中止してください。
- ご使用になる前に必ずグリップにキズ・ヒビ、シャフトのキズ・曲がり、ボタンの不具合、ガタツキ、先端ゴムの異常がないか点検してください。
- ご使用前にボタンが調節穴から確実に出ているか、固定リングがしっかり締められているか確かめてください。
- グリップ以外のところを持って歩かないでください。


- 柔らかい路面や雪道では使用しないでください。
- 濡れた床など路面が滑りやすくなっている場所での使用はお避けください。
- 先端ゴムが消耗したり、破損した場合は使用を止め、新しいものと交換してください。
交換時は4個とも同時に行ってください。個別の交換ではグラツキや転倒の原因になります。
- 先端ゴムは必ず装着してください。グラツキ、転倒の原因となり大変危険です。
- 過度な長さ調節を繰り返すと、シャフト及びボタンの表面に傷が付く場合があります。
- 本製品はあくまでも歩行補助を目的としています。過度な荷重がかかると、調節穴から破損する危険性があります。
- 横から過度な力を加えられると破損の恐れがあります。
- ご使用中に変形や曲がり、ネジのゆるみなどによるガタツキや異音がした場合は、すぐに使用を中止してください。
- 階段の昇り降り、車の乗り降りなど段差のあるところでの使用の際は十分ご注意ください。
- 品質保持のため、高温多湿や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- 高齢者や握力の弱い方が使用する際は、事故防止のため、周囲の方が常に観察の上ご使用ください。

特長

- オールアルミ製の超軽量タイプです。
- 長さを12段階で調節できますので、身長に合った正しい長さに合わせることができます。
- 滑りにくく、耐久性のあるグリップを採用しています。


正しい長さの選び方

- 杖の先端を同側の足先の前外方20cmに置いたとき、ひじが30～40度になる位置が、杖が安定する長さです。

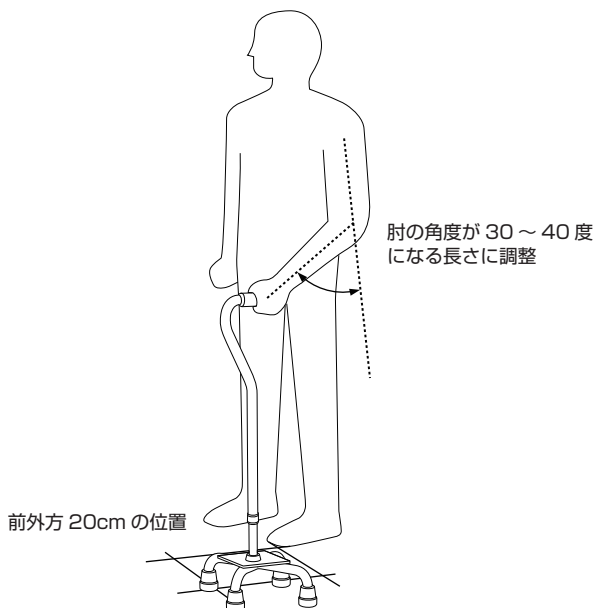

杖の長さ調節方法


- 固定リングをゆるめます。
- ボタンを押しながら、からだに合った長さに調節します。ボタンが調節穴から確実に出ているか確かめてください。
- ※ ボタンの穴は20mm間隔で12段階に分かれています。
- 固定リングをしっかり締め、確実に固定されているか確かめてください。

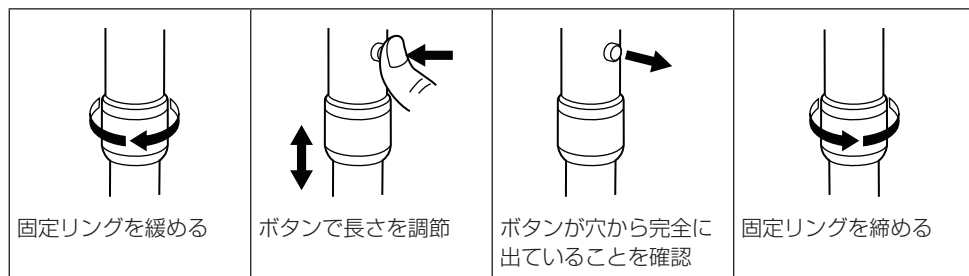

左右切替え方法

- 固定リングをゆるめます。
- ボタンを押し込み、シャフトを180度回転させます。
- ボタンが調節穴から確実に出ているか確かめてください。
- 固定リングをしっかり締め、確実に固定されているか確かめてください。

<脚の位置と安全杖の位置>

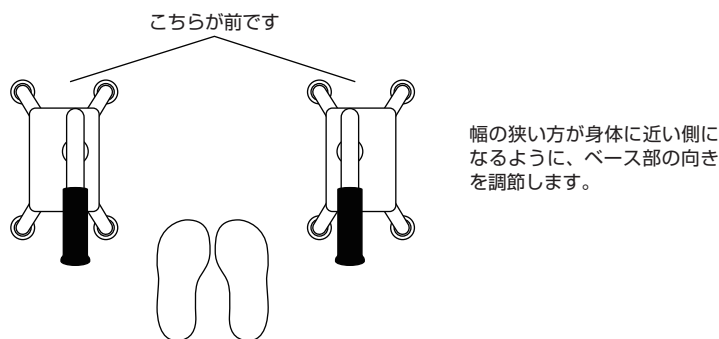

- 先端ゴムが消耗したり、破損した場合は使用を止め、新しいものと交換してください。交換時は4個とも同時に行ってください。個別の交換ではグラツキや転倒の原因になります。

保管方法

- 雨などで濡れた時は、シャフトを抜いて水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。そのまま放置すると錆びて故障の原因となります。
- 落ちにくい汚れは、中性洗剤をつけたやわらかい布で拭き取ってください。薬品、金属タワシなどは損傷の原因となりますので使用しないでください。
- 品質保持のため、高温多湿や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。

仕様

商品コード	8-1219-01	8-1219-02	8-1219-03
型番	PW-101-AL-SI	PW-101-AL-BK	PW-101-AL-BR
カラー	シルバー	ブラック	ブロンズ
全長	68～85cm 12段階調節（20mmピッチ）		
接地面	15×21cm		
重量	約630g		
脚パイプ先端径	φ16mm		
交換用先端ゴム	グレー 50015GR（商品CD：0-1405-06） ブラック 50015BL（商品CD：0-1405-07）		

Made in TAIWAN

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	4点杖（軽量アルミニウム製）
型 式	PW-101-AL-SI, PW-101-AL-BK PW-101-AL-BR
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875（フリーダイヤル）



FAX 0120-700-763（フリーダイヤル）



問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社