

↑ この上限ライン以上に入れないで下さい。 ↓



△ 危険

感染性医療廃棄物(鋭利なもの)

ディスポ針ボックス 1ℓ

ご使用方法

■ フタの四隅をしっかりと押し込み、フタを組み立ててください。■ フタを開け、注射器の先端まで入れます。■ 切り込み部に注射針を引っ掛け、外してください。■ フタのツメを上げ、上からしっかりと押せばフタになります。■ 上限ラインまで入りましたら、ロックのツメを差込み、確実に封がされている事を確認の上、廃棄してください。

安全のために

- 確実な組立が出来ない場合には使用をお控え下さい。
- 無理に詰め込まないでください。針が貫通する恐れがあります。
- 容器を倒したり、ひっくり返すと内容物が漏れ出る場合があります。
- 容器の再使用はおやめください。

8-7221-01



使 用 開始日	
組立者	

アズワン株式会社
大阪市西区江戸堀2-1-27
カスタマー相談センター
☎ 0120-711-875
navis
Made in CHINA

8-7221-01/1ℓ