

# 取扱説明書

Instruction Manual


## 洗髪槽（樹脂製）

# navis\*

8-2238-01 ブルー  
8-2238-02 ホワイト

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
本製品は患者様や介護を受ける方などの洗髪槽として設計されています。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 外觀図

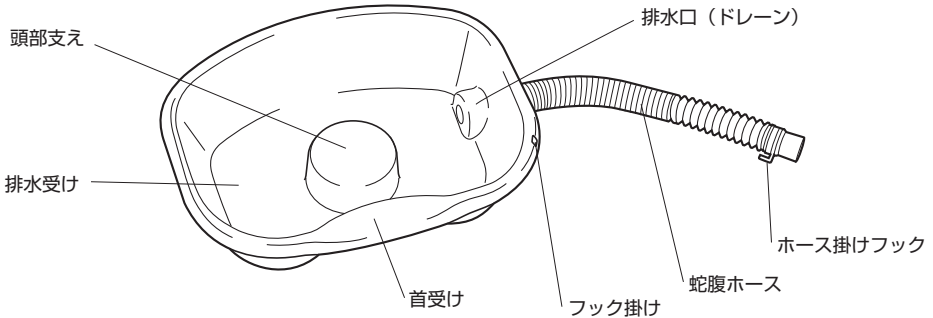

### <セット内容>

- 洗髪槽本体 × 1個
- 蛇腹ホース（排水用） × 1本

※ ドレーンプラグ(排水栓)は付属していません。弊社取り扱いの下記プラグ（シリコン栓）が適応しますので、別途お買い求めください。

適応プラグ： 品番 6-336-08  
商品名 シリコン栓 No.8（1個入）

**!** **注意** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- ご使用の際には洗髪を受ける方に常に目を配ってご使用ください。
- 洗髪にお使いになるお湯の温度には充分ご配慮し、やけどすることのないよう温度管理をしてください。
- ご使用の際にはベッドの上など洗髪を受ける方の姿勢に無理のないよう、ご使用ください。
- 安全のため、洗髪槽は水平の安定した場所でご使用ください。
- 排水が排水口縁の上端より上に貯まる前に排水してください。
- ご使用の際は、蛇腹ホース（排水用）のフックを本体のフック掛けに掛けてご使用ください。排水がこぼれて周りを濡らす恐れがあります。  
(別売のドレーンプラグをお使いいただくと、より安全にお使いいただけます。)

本取扱説明書で不明な点は、当社のカスタマー相談センター（裏表紙に記載）まで御連絡ください。

## 特長

- 洗髪槽中心の頭部支えにより、汚れた排水に頭部を浸ける心配がありません。
- 首受けがありますので、洗髪をする方／受ける方双方の負担を少なく洗髪出来ます。
- 蛇腹ホース（排水用）をフック掛けに掛けておけますので、排水ホースを常に保持している必要がありません。
- 別売のドレーンプラグをご使用頂ければ、排水の漏れをより防ぐことが出来ます。


## 使用方法

- 1** 洗髪槽本体に付属の蛇腹ホース（排水用）を奥まで接続してください。その際、フックのついていない方を本体排水口外側から差し込んでください。

**⚠ 注意** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- しっかりと奥まで差し込んでいない場合、排水が漏れることがあります。

- 2** 蛇腹ホース（排水用）のフックがついている部分を排水漏れ防止のため、洗髪槽本体右側（手前）のフック掛けにしっかりと掛けてください。  
ドレーンプラグ（排水栓）をご使用になる際には、洗髪槽内側排水口に奥までドレーンプラグを差し込んでください。

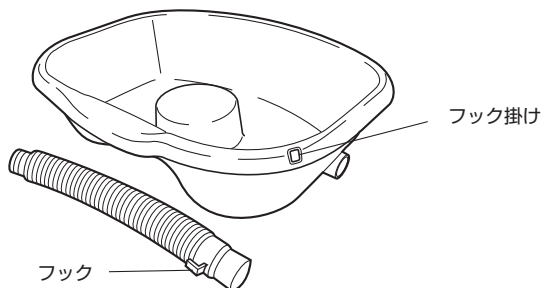

- 3** 洗髪を受ける方が仰向けになった状態で、洗髪槽本体の頭部支えに後頭部、首を首受けに置き、洗髪を始めてください。その際、排水漏れないことを確認しながら、ご使用ください。
- 4** 蛇腹ホース（排水用）は伸縮可能です。排水する際には、床に容量が4ℓ以上あるバケツなどを置き、蛇腹ホース（排水用）をフック掛けから外し、ゆっくりとバケツに排水してください。急いでフック掛けから外すと、排水が勢い良く出てきますので、ご注意ください。
- 5** ドレーンプラグ（排水栓）をご使用になった場合には、**4**の後にドレーンプラグ（排水栓）を外してください。
- 6** ご使用後は、「お手入れの方法」を参考にして、お手入れしてください。

## お手入れ方法

- 本商品を未永くご使用いただくために、定期的にお手入れしてください。
- ご使用後は蛇腹ホース（排水用）を伸ばした状態で上からぶら下げて水分を乾かしてください。洗髪槽本体は、水分が乾くようにタオルなどで拭いた後に良く乾燥させてください。
- シンナー・アルコール等の有機溶剤・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわし等はお使いにならないでください。

## 仕様

品番	8-2238-01	8-2238-02
本体色	ブルー	ホワイト
サイズ	本体／W465×D370×H124mm 蛇腹ホース／（最短）L330～（最長）1,250×φ40mm	
製品重量	本体／758g、蛇腹ホース（排水用）／62g	
洗髪槽容量	約4ℓ	
適応ドレインプラグ径	上径（下径）φ2.9（φ2.2）×H2.9mm	
材質	本体／PP（ポリプロピレン）、 蛇腹ホース（排水用）／PE（ポリエチレン）	

（本仕様は性能向上のため、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。）

Made in CHINA

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

## 商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

 0120-711-875 (フリーダイヤル)

 0120-700-763 (フリーダイヤル)

 <http://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**