

取扱説明書

Instruction Manual

床ずれ予防パッド

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

F3-Y F3-W

F3-B F3-P

使用上のご注意

- ・必ずシーツを掛けてご使用ください。そのままご使用になりますと、網目のあとが身体につくことがあります。
- ・未使用時は備え付けの袋に入れて保管してください。変色のおそれがあるので直射日光は避けてください。
- ・上に重量物を長時間載せないでください。クッション性を損なう恐れがあります。

洗濯方法

- ・洗濯機で簡単に丸洗い出来ます。その際は出来るだけ小さくたたんで洗濯ネットを使用してください。40℃以下のぬるま湯、または水で洗濯してください。
- ・脱水機にかけてそのまま陰干してください。乾燥機は使用しないでください。生地が変形することがあります。
- ・塩素系の漂白剤は使用しないでください。
- ・洗濯機適合サイズ:6.0kg以上でご使用ください。

特 長

- ・夏は通気性が抜群で常に快適です。
- ・冬は敷き毛布、または厚手のシーツで床ずれ予防パッドを包むようにご使用いただければ、フュージョン独自の立体構造の空気層が程良い暖かさを保ってくれます。
- ・電気毛布をご使用の場合は床ずれ予防パッドの下に敷きご使用ください。柔らかい暖かみが得られます。

仕 様

材 質:フュージョン[®] (ナイロン74%、ポリエステル26%)

サイズ: 幅 91× 長さ 190× 厚み 1(cm)

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2015年11月初版