

ご購入ありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この「取扱説明書」をお読みになって、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡される時、必ずお渡しする際には新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方をするために、この「取扱説明書」を製品本体の目立つところに添付して下さい。

ご注意ください



改造禁止

製品の改造及び用途以外の使い方はしないで下さい。




高温注意

熱湯使用させてください。お湯にはご注意ください。




入浴中は手指がやわらかくなります。成形バリには十分注意してください。

製品仕様

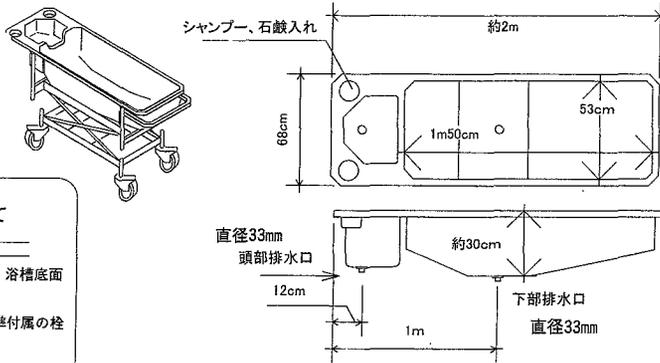


●排水口について

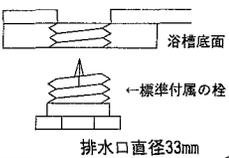

別売り部品


- STAND浴槽台 組立式(別売り)
商品コード 0-5817-11

- スチールパイプ製(塩ビコーティング)
680×2030×600(高さ)

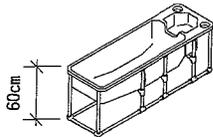


- シャワーヘッド掛け(別売り)
商品コード 0-5817-13

- 吸盤を使用していますので、好きな位置にシャワーヘッドを取り付けることができます。(なめらかな平面に取り付けて下さい。)

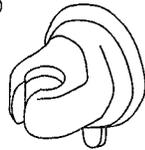


- ジャバラホース (別売り)
商品コード 0-5817-14 (一本入り)

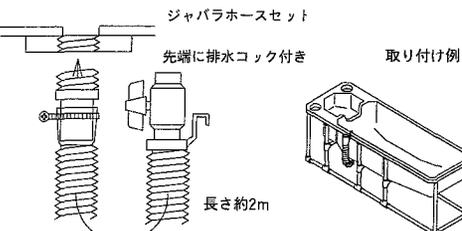

- 手すり(一本入り)(別売り)
商品コード 0-5817-12

- *本体オプションの手すりは入浴者がつかまるためのものです。この手すりを持って浴槽を持ち上げたりしないで下さい。浴槽を破損する恐れがあります。
- また、左右両側に取り付けると浴槽から出る際に邪魔になりますので片側につけてください。

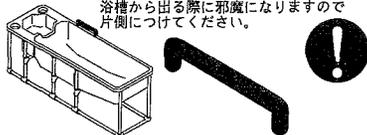


ご使用方法



- ①浴槽台を平坦なところにおいてください。




- ②浴槽にお湯を入れてください。(熱湯を直接入れないでください。(熱湯を使う場合には、まず浴槽に水を入れそれから少しずつお湯を入れるようにしてください。))

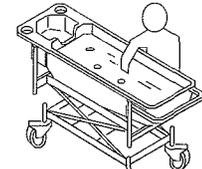

- ③必ずお湯加減を確かめてから入浴者を入れてください。




- ④入浴者がふらつくようでしたらフレーム、もしくは取手を持たせてください。
*取手は左右どちらかにつけてください。

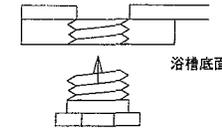


- ⑤お湯を抜くときは底面の排水栓を回して抜いてください。



- ⑥入浴者が変わることにより必ず浴槽を清掃してください。

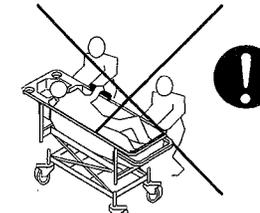

- ⑦人が入ったまま浴槽を持ち上げたり移動させたりしないでください。転倒したり、浴槽が破損したりする危険性があります。

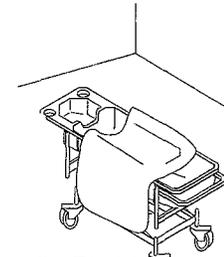

- ⑧使用後はよく洗って、乾燥し、直射日光の当たらない場所に保管してください。



浴槽そばでは電気機器は使用しないでください。安全アース端子付の機器の場合、アース線を接続してください。

商品に関するお問い合わせは

* 製品についてのご質問には専用窓口にてお答えしております。

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-700-763

E-MAIL q@soas-1.co.jp

受付時間 月曜～金曜 午前9:00～12:00 午後1:00～5:30
*土日、祝日および弊社休業日はご利用いただけません。

ご購入あげ年月日	年 月 日
購入先店名	
住所	
お電話番号	

2001年 3月 第二版作成