

簡易浴槽用スタンド組立方法

●組み立てる前に


部品がすべてそろっていることを確認してください。
内容物（フレーム×左右各1、接続パイプ7本、接着剤1本）

●仮組立

仮組立の時にはパイプを完全に差し込んで下さい。
その際にはパイプの切断面で手を切らないよう、手袋をしてください。



●組立時には

一度接着すると外れません。ご注意ください。
接着面はきれいにしてから接着して下さい。
平らなところで接着して下さい。
接着剤があふれないよう注意して下さい。
接着直後は動かさないで下さい。

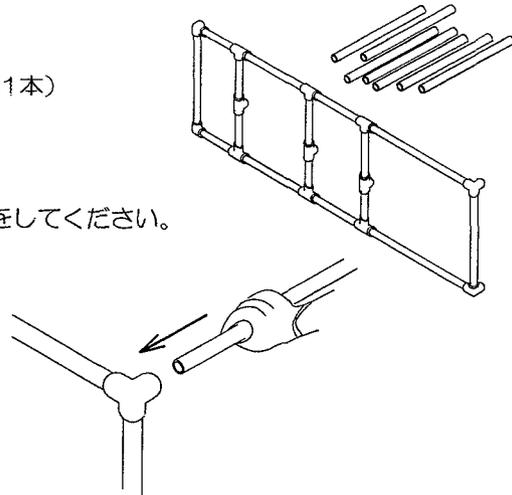


①平らな場所に片方のフレームを寝かせて
上からパイプを差し込み、すきまに接着剤を
流し込んで下さい。


②奥までしっかり差し込み、
すきまに接着剤を流し込んで下さい。
接続パイプ7本をつけたら上から
もう片方のフレームに取り付けて下さい。

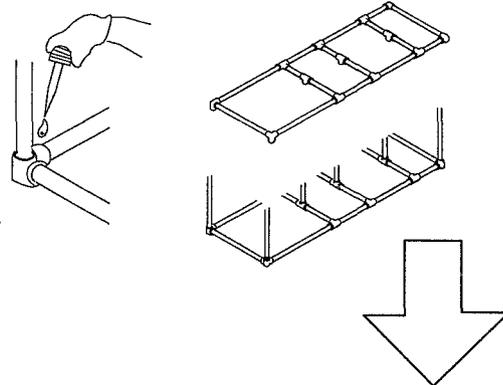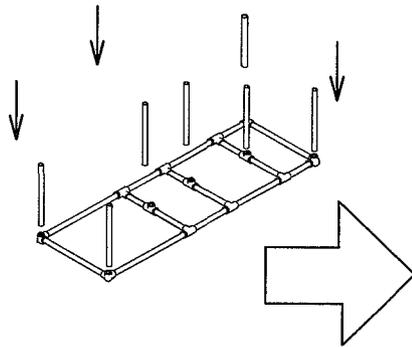

完成

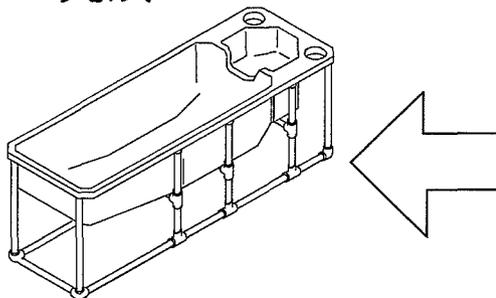

③両方のフレームが完全に接着できたことを
確認してからひっくり返して下さい。

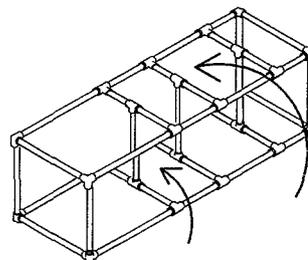

●接着剤の取扱について

- ①有害ですので飲んだり、吸引したりしないで下さい。
- ②可燃性ですので火気に近づけたりしないで下さい。
- ③目に入ったときは直ちに水で洗い流して下さい。
- ④皮膚に直接付けないで下さい。ついたときはすぐに石鹸で洗い流して下さい。
- ⑤組立中は必ず換気を行って下さい。
- ⑥プラスチック類を侵すことがあります。メガネ、衣類
そのほかプラスチック製品には付けないで下さい。
- ⑦シンナーなど、他の溶剤と混ぜないで下さい。
- ⑧子供の手が届かない冷暗所に保管して下さい。

アズワン株式会社

フリーダイヤル  0120-700-875

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

組立説明書No.KK-TT001-01
2001年8月 第2版作成